



GLIDE SCOPE CORE

Návod k použití a údržbě

GLIDSCOPE CORE

Návod k použití a údržbě

Platnost 24. ledna 2020

Upozornění: Federální zákony (USA) omezují prodej
tohoto zařízení na lékaře nebo na objednávku lékaře

KONTAKTNÍ INFORMACE

Chcete-li získat další informace o systému GlideScope, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Verathon nebo navštivte stránky verathon.com/global-support.

Verathon Inc.

20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011 U.S.A.
Tel: +1 800 331 2313 (pouze USA a Kanada)
Tel: +1 425 867 1348
Fax: +1 425 883 2896
verathon.com



Verathon Medical (Evropa) B.V.

Willem Fenengastraat 13
1096 BL Amsterdam
Nizozemsko
Tel: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92



Verathon Medical (Kanada) ULC

2227 Douglas Road
Burnaby, BC V5C 5A9 Kanada
Tel: +1 604 439 3009
Fax: +1 604 439 3039

Verathon Medical (Austrálie) Pty Limited

Unit 9, 39 Herbert Street
St Leonards NSW 2065
Austrálie

V rámci Austrálie: Tel.: 1800 613 603 / Fax: 1800 657 970
Mezinárodní tel.: +61 2 9431 2000 / Fax: +61 2 9475 1201



Copyright © 2020 společnost Verathon Inc. Všechna práva vyhrazena. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verathon Inc. je zakázáno kopírovat nebo přenášet jakýmkoli způsobem jakoukoli část této příručky.

GlideScope, symbol GlideScope, GlideScope Core, GVL, GlideRite, QuickConnect, Reveal, Spectrum, Verathon a symbol Verathon Torch jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Verathon Inc. Všechny ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Ne všechny produkty společnosti Verathon Inc. zobrazené nebo popsané v tomto návodu jsou v prodeji ve všech státech.

Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Nejnovější informace naleznete v dokumentaci dostupné na stránkách verathon.com/product-documentation.

OBSAH

DŮLEŽITÉ INFORMACE	1
INFORMACE O PRODUKTU	1
POPIS PRODUKTU	1
PROHLÁŠENÍ O URČENÍ VÝROBKU.....	1
ZÁKLADNÍ FUNKCE.....	1
PROHLÁŠENÍ O URČENÍ VÝROBKU.....	1
PROHLÁŠENÍ O POVINNÉM PŘEDPISU	1
OCHRANA SOUKROMÍ DLE HIPAA.....	1
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE	1
VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ	2
ÚVOD	6
GLIDESCOPE CORE	6
ČÁSTI SYSTÉMU A PŘÍSLUŠENSTVÍ	7
TLAČÍTKA, IKONY A SPOJENÍ	8
FUNKCE SYSTÉMU	14
HLAVNÍ OBRAZOVKA.....	14
GALERIE.....	15
NASTAVENÍ.....	16
POSTUP 1. <i>PROVEĎTE ÚVODNÍ KONTROLU.....</i>	<i>16</i>
POSTUP 2. <i>MONTÁŽ SYSTÉMU (VOLITELNÉ).....</i>	<i>17</i>
POSTUP 3. <i>NABÍTÍ BATERIE MONITORU</i>	<i>20</i>
POSTUP 4. <i>DOKONČENÍ PRŮVODCE NASTAVENÍM (VOLITELNÉ).....</i>	<i>21</i>
POSTUP 5. <i>KONFIGURACE UŽIVATELSKÝCH NASTAVENÍ (VOLITELNÉ).....</i>	<i>24</i>
POSTUP 6. <i>PŘIPOJENÍ VIDEOKABELU A ENDOSKOPU.....</i>	<i>27</i>
POSTUP 7. <i>PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ USB (VOLITELNÉ)</i>	<i>30</i>
POSTUP 8. <i>PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO MONITORU (VOLITELNÉ).....</i>	<i>31</i>
POSTUP 9. <i>PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY</i>	<i>32</i>
POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ.....	33
POSTUP 1. <i>PŘÍPRAVA SYSTÉMU</i>	<i>33</i>
POSTUP 2. <i>POUŽITÍ PULZNÍHO OXYMETRU USB</i>	<i>34</i>
POSTUP 3. <i>ZMĚNY ROZLOŽENÍ VIDEA.....</i>	<i>35</i>
POSTUP 4. <i>OTOČENÍ OBRAZU</i>	<i>36</i>
POSTUP 5. <i>ZÁZNAM VIDEA NEBO POŘÍZENÍ RYCHLÉHO SNÍMKU.....</i>	<i>36</i>

POSTUP 6. POUŽITÍ GALERIE	37
ZPRACOVÁNÍ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ	42
ÚDRŽBA A BEZPEČNOST	43
PRAVIDELNÉ KONTROLY	43
BATERIE SYSTÉMU GLIDESCOPE CORE	43
SYSTÉMOVÝ SOFTWARE	43
OPRAVY ZAŘÍZENÍ	44
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ	44
OMEZENÁ ZÁRUKA	45
SPECIFIKACE PRODUKTU	47
SPECIFIKACE SYSTÉMU, NORMY A SCHVÁLENÍ	47
SPECIFIKACE SOUČÁSTÍ	47
SPECIFIKACE BATERIE	49
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	49
GLOSÁŘ	54

DŮLEŽITÉ INFORMACE

INFORMACE O PRODUKTU

Monitory GlideScope Core umožňují připojení široké škály příslušenství a tím i inovativní konfigurace systému. Díky dvěma vstupům mohou uživatelé přepínat mezi různými endoskopy bez nutnosti ručního přepojování nebo také zobrazit souběžně dva různé nástroje pomocí obrazu v obraze (Core 10) nebo duálního zobrazení Dual View (Core 15).

POPIS PRODUKTU

GlideScope Core je ucelený systém, s nímž máte okamžitý přístup k nástrojům pro zobrazení dýchacích cest. Základem systému GlideScope Core je 10palcový nebo 15palcový dotykový monitor s vysokým rozlišením a kompletní pracovní stanice, které přinášejí vyšší viditelnost a pokročilejší pracovní postupy.

Další informace o kompatibilních endoskopech najdete v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940), který je k dispozici na adrese verathon.com/product-documentation.

PROHLÁŠENÍ O URČENÍ VÝROBKU

Monitory a pracovní stanice jsou určeny k použití s videolaryngoskopy v kombinaci s dalším přídatným vybavením pro účely laryngoskopie dýchacích cest.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Při připojení kompatibilních kamerových komponent (jako např. videolaryngoskopu) je základní funkcí monitoru podpora těchto komponent v podobě zobrazení zřetelného, nerušeného pohledu na dýchací cesty pro lékařské účely.

PROHLÁŠENÍ O URČENÍ VÝROBKU

Systém GlideScope Core je určen k použití na profesionálních zdravotnických pracovištích.

PROHLÁŠENÍ O POVINNÉM PŘEDPISU

Upozornění: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto zařízení na lékaře nebo na objednávku lékaře

Systém by měly používat pouze řádně proškolené osoby se svolením lékaře nebo poskytovatelé zdravotní péče, kteří absolvovali školení a získali oprávnění u instituce poskytující péči o pacienty.

OCHRANA SOUKROMÍ DLE HIPAA

Předpisy zakotvené v zákoně o přenositelnosti a odpovědnosti v oblasti zdravotního pojištění (Health Insurance Portability and Accountability Act z roku 1996, „HIPAA“) příkazují našim zákazníkům sledovat a omezovat způsoby, kterými lze přistupovat k důvěrným informacím pacientů, používat je, ukládat, přenášet a odstraňovat je. Za ochranu všech elektronických zdravotních údajů zapsaných v systému mají konečnou odpovědnost naši zákazníci. Při případném servisním zásahu u zákazníka společnost Verathon ze systému odstraní veškeré zde případně uložené chráněné zdravotní informace.

Návod k použití a údržbě: Důležité informace

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY UŽIVATELE

Společnost Verathon doporučuje všem uživatelům, aby si před použitím systému přečetli tento návod k použití. V opačném případě může dojít k poranění pacienta, narušit řádné fungování systému nebo způsobit neplatnost záruky. Novým uživatelům společnost Verathon doporučuje:

- Vyžádejte si pokyny kvalifikované osoby
- Před klinickým použitím si použití videolaryngoskopu nacvičte na figuríně

- Návčik klinického použití provedte na pacientech bez abnormálních nálezů v dýchacích cestách

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Varování upozorňují na nebezpečí poranění, úmrtí nebo jiných vážných nežádoucích reakcí v důsledku použití nebo nesprávného použití přístroje. *Upozornění* poukazují na skutečnost, že použití nebo nesprávné použití přístroje může způsobit určitý problém, jako je jeho nesprávné fungování, porucha nebo poškození. V návodu věnujte pozornost částem označeným jako *Důležité*, neboť v nich najdete připomenutí či shrnutí následujících upozornění, která platí pro konkrétní součást nebo způsob použití. Dbejte prosím následujících varování a upozornění.

UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že přístroj funguje správně a nevykazuje známky poškození. Zpozorujete-li známky poškození přístroje, výrobek nepoužívejte. Servisní zásahy svěřte kvalifikované osobě.

Vždy mějte připraveny alternativní metody a vybavení k zajištění dýchacích cest.

Jakékoli podezření na závadu prosím oznamte zákaznické podpoře společnosti Verathon. Kontaktní informace najdete na stránce verathon.com/global-support.



UPOZORNĚNÍ

Do vzdálenosti 30 cm (12 palců) od kterékoliv součásti systému GlideScope Core, včetně kabelů specifikovaných nebo dodaných společností Verathon k použití se systémem, není dovoleno používat přenosná vysokofrekvenční zařízení (včetně periferních prvků, jako jsou anténní kabely a externí antény). Při nedodržení této vzdálenosti může dojít ke zhoršení fungování systému a rušení obrazu.



UPOZORNĚNÍ

Společnost Verathon nijak neanalyzovala kompatibilitu systému v prostředích, kde je instalováno zařízení na principu magnetické rezonance (MRI). Z tohoto důvodu musí vlastník systému vyloučit použití systému v prostředí s výskytem magnetické rezonance (MR).



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze pasivní jednotky USB flash. Nepoužívejte jednotky USB flash napájené z jiného vnějšího zdroje.

UPOZORNĚNÍ: ZPRACOVÁNÍ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k tomu, že produkt může být kontaminován lidskou krví nebo tělními tekutinami schopnými přenášet patogeny, musejí všechna čistící zařízení a prostředky splňovat normu (USA) OSHA Standard 29 CFR 1910.1030 „Patogeny přenosné krví“ nebo jinou ekvivalentní normu.



UPOZORNĚNÍ

Tento produkt lze čistit pouze schválenými postupy uvedenými v Návodu ke zpracování produktů GlideScope k opakovanému použití (GlideScope Products Reprocessing Manual) (katalogové číslo 0900-5032). Uvedené metody čištění společnost Verathon doporučuje s ohledem na efektivitu nebo kompatibilitu s materiály jednotlivých součástí.

UPOZORNĚNÍ: BEZPEČNOST PRODUKTU



UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj a příslušenství mohou obsahovat baterie a jiné materiály nebezpečné pro životní prostředí. Až přístroj nebo jeho příslušenství dosáhnou konce životnosti, nalistujte prosím část nazvanou Likvidace přístroje. Použité jednorázové součásti prosím likvidujte jako infekční odpad.



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem používejte pouze příslušenství a periferie doporučené společností Verathon.



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zachování elektrické bezpečnosti systému je nutné, aby externí monitory splňovaly certifikaci podle norem IEC 60601-1, IEC 60950-1 nebo ekvivalentních.



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zachování elektrické bezpečnosti používejte pouze přibalený napájecí zdroj. Napájecí kabel a adaptér připojte do řádně uzemněné zásuvky a ujistěte se, že je snadný přístup k odpojovacímu prvku. Používejte pouze příslušenství a periferie doporučené společností Verathon.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepokoušejte se otevírat součásti systému. Mohlo by dojít k vážnému úrazu obsluhy nebo poškození přístroje; ruší se tím také záruka na zařízení. Se všemi servisními potřebami se prosím obraťte na zákaznickou podporu společnosti Verathon.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí uložené mechanické energie. Mechanismus ramene prémiové pracovní stanice je pod napětím. Při odstranění monitoru se může samovolně uvést do pohybu. Před odstraněním monitoru se ujistěte, že rameno je v nejvyšší poloze.



UPOZORNĚNÍ

Při použití jiného příslušenství či kabelů, než uvádí nebo dodává společnost Verathon, může v systému dojít k elektromagnetickým poruchám včetně zvýšení vyzařování nebo snížené odolnosti. Zařízení pak nemusí fungovat správně, může dojít k prodlevám nebo oběma těmito nežádoucím projevům.



UPOZORNĚNÍ

U zařízení GlideScope Core v provedení s 15palcovým monitorem může při určitých vysunutých polohách dojít k převržení pracovní stanice GlideScope Core Premium a možnému zranění. V rámci prevence tohoto nebezpečí před pojižděním se systémem přesuňte monitor do nejnižší polohy co nejbliže hlavní části.



UPOZORNĚNÍ

Není dovoleno provádět jakékoli úpravy tohoto zařízení.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte napájecí adaptér v blízkosti hořlavých anestetik.

UPOZORNĚNÍ



UPOZORNĚNÍ

Elektrická zdravotnická zařízení podléhají zvláštním ochranným opatřením z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a je třeba je instalovat a provozovat dle pokynů v tomto návodu. Další informace najdete v části Elektromagnetická kompatibilita.

Nepoužívejte systém GlideScope v těsné blízkosti jiných zařízení ani jej nevkládejte pod jiná či nad jiná zařízení. Je-li použití v kombinaci s jinými zařízeními vedle sebe nebo nad sebou nutné, zkontrolujte, zda systém v požadované konfiguraci funguje správně.

Toto zařízení může vyzařovat vysokofrekvenční energii a velmi pravděpodobně nezpůsobí škodlivé rušení jiných zařízení v blízkém okolí. Nelze však zaručit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde. Rušení se může projevit jako zhoršení výkonu tohoto zařízení nebo jiných zařízení používaných současně. Dojde-li k takovému jevu, pokuste se vyřešit rušení následujícími kroky:

- Vypínáním a zapínáním blízkých zařízení zjistěte zdroj rušení
- Upravte orientaci nebo umístění tohoto nebo jiných zařízení
- Zvětšete odstup mezi přístroji
- Připojte přístroj k zásuvce jiného obvodu, než ke kterému jsou připojena ostatní zařízení
- Odstraňte nebo snižte EMI technickými prostředky (např. stíněním)
- Nakupujte zdravotnické prostředky splňující požadavky na EMC dle normy IEC 60601-1-2

Mějte na paměti, že přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační přístroje (mobilní telefony atd.) mohou ovlivnit elektrické zdravotnické přístroje; při provozu dodržujte přiměřená ochranná opatření.



UPOZORNĚNÍ

Systém obsahuje elektronické součásti, které by mohlo poškodit použití ultrazvukových a automatických mycích zařízení. Nepoužívejte proto k čištění tohoto produktu jiná ultrazvuková či automatická mycí zařízení, než která byla schválena společností Verathon.



UPOZORNĚNÍ

Při čištění obrazovky monitoru se vyvarujte použití abrazivních kartáčů, houbiček či nástrojů. Mohlo by dojít k poškození obrazovky a trvalému poškození přístroje.

ÚVOD

GLIDESCOPE CORE

Monitor je kompatibilní s následujícími jednorázovými a opakovaně použitelnými endoskopickými nástroji, které jsou v tomto návodu označovány jako *endoskopy*:

- Jednorázové lžíce Spectrum
- Titanové lžíce pro opakované použití
- Optické násady a lžíce

Monitor používá endoskopy a propojovací kabely spolu s volitelným příslušenstvím, které usnadňují intubace, endoskopii či pohodlí pacienta.

Můžete použít buď jednorázové, nebo opakovaně použitelné součásti; případně se může vaše pracoviště rozhodnout, že bude používat obě konfigurace. V tomto návodu je popsáno, jak se monitor používá, a dále jsou zde v omezené míře informace k připojení endoskopů. Další informace o kompatibilních endoskopech najdete v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940) nebo u oddělení zákaznické podpory společnosti Verathon:

Aktuální vydání tohoto návodu najdete na adrese verathon.com/product-documentation.

Pokud není uvedeno jinak, pojem *videokabel* v tomto dokumentu označuje všechny možné konfigurace kabelů pro opakovaně použitelné lžíce, jednorázové lžíce i optickou násadu. Pojem endoskop popisuje všechny možné konfigurace laryngoskopu.

JEDNORÁZOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednorázové lžíce Spectrum a optická násada 2.0 se k monitoru připojují opakovaně použitelným kabelem GlideScope Core Smart Cable.

Jednorázové videolaryngoskopy jsou značeny písmenem S v názvu lžíce (například *LoPro S4*). Optické násady používají jednorázové lžíce GVL, které se nabízejí v široké škále velikostí tak, aby se lékaři mohli přizpůsobit specifickým požadavkům pacientů v rozsahu od předčasně narozených dětí až po dospělé mohutné postavy.

Všechny jednorázové součásti je třeba po prvním použití zlikvidovat.

DŮLEŽITÉ


Jednorázové lžíce ve velikostech S3 a S4 mohou být k dispozici též v bílé barvě. V takovém případě se nejedná o součást jednorázového systému Spectrum. Další informace o bílých lžících najdete v *Návodu k použití a údržbě jednorázového systému GlideScope Titanium* (GlideScope Titanium Single-Use Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4712), který je k dispozici na adrese verathon.com/product-documentation.

OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Titanové videolaryngoskopické lžíce je nutné po použití vyčistit a provést dezinfekci vyššího stupně. K videomonitoru se připojují opakovaně použitelným videokabelem GlideScope Core Video Cable. Vzhledem k titanové konstrukci jsou opakovaně použitelné lžíce označeny písmenem T v názvu lžíce, jako například *LoPro T4*.

ČÁSTI SYSTÉMU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tabulka 1. Povinné součásti systému

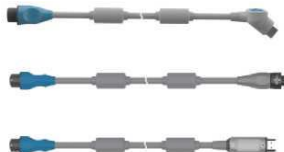POVINNÉ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Videomonitor GlideScope		
GlideScope Core 10	GlideScope Core 15	
		
Napájecí adaptér 12V DC	Napájecí kabel	Videokabel*†
		
Jeden či více z následujících typů endoskopu:		
Jednorázové lžice Spectrum†	Optické násady a jednorázové lžice†	Titanové lžice pro opakované použití†
		

* Kabel zkrácen pro ilustrační účely.
† Celý seznam kompatibilních kabelů a videolaryngoskopů najdete v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940).

Tabulka 2. Volitelné součásti systému

VOLITELNÉ SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Základní pracovní stanice	Prémiová pracovní stanice (0800-0557)	Prémiová pracovní stanice (0800-0636)	
			
Externí pulzní oxymetr Nonin 3231 USB*	Mandrény GlideRite†	Jednotka USB flash k ukládání médií	Návod k použití a údržbě na jednotce USB
			

TLAČÍTKA, IKONY A SPOJENÍ

Digitální plně barevný videomonitor GlideScope jasně zobrazuje snímky přenášené z kamery v endoskopu. Na přední části monitoru je umístěno tlačítko napájení a dotyková obrazovka.

Zadní panel monitoru obsahuje zásuvky a porty k připojení napájecího kabelu, videokabelů, jednotek USB flash a kabelu HDMI pro externí obrazovku. Pokud porty USB a HDMI nepoužíváte, doporučujeme do otvoru vložit gumovou krytku. Ochraňuje konektory před prachem a jinou kontaminací. Na zadní stěně monitoru jsou také montážní otvory VESA, které umožňují připevnit monitor k pracovní stanici GlideScope.

V následujících tabulkách jsou uvedeny informace k jednotlivým tlačítkům a ikonám na monitoru.

* Není k dispozici na všech trzích.

† Celý seznam kompatibilních mandrén najdete v *Návodu k použití a údržbě mandrén GlideRite DLT Stylet* (GlideRite DLT Stylet Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4841) a *Návodu k použití a údržbě mandrén GlideRite Rigid Stylet DLT* (GlideRite Rigid Stylet Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4686).

Tabulka 3. Tlačítka na monitoru

SKUPINA TLAČÍTEK	TLAČÍTKO	FUNKCE
Čelní panel		Vypínač: Fyzické tlačítko v levém dolním rohu obrazovky. Stiskem a uvolněním monitor zapnete. Stiskem a přidržením monitor vypnete. <i>Poznámka: Pokud monitor kdykoli při použití přestane reagovat, stiskněte vypínač a 7 sekund jej přidržte. Systém se vypne.</i>
Základní obrazovka (levá strana) - tlačítka pro média a hlavní nabídka		Záznam (přepínač): Nahraje všechny zobrazené videosignály. Ikona tlačítka se během záznamu a podle aktuálního stavu a režimu záznamu mění takto:  Video se nahrává. Stiskem ukončíte záznam.  Video se nahrává se zvukem. Stiskem ukončíte záznam.  Chyba videozáznamu.  Chyba videozáznamu se zvukem.
		Rychlý snímek: Pořídí fotografii videosignálu. Při selhání se ikona změní na symbol s upozorněním: 
		Editor poznámek: Spustí Editor poznámek. Při selhání se ikona změní na symbol s upozorněním: 
		Hlavní nabídka: Zobrazí vysouvací Hlavní nabídku s tlačítky Galerie a Nastavení. Je-li aktivována funkce Otočení videa, zobrazí se také.
		Filtr oblíbených položek: Přepínač filtru oblíbených položek. Je-li filtr aktivní, hvězdička a přepínač se namísto šedé zbarví žlutě.
Stavový řádek		Seřadit podle data (Galerie): Šipkou nahoru  nastavíte vzestupné pořadí, šipkou dolů  pořadí sestupné.
Vysouvací Hlavní nabídka		Galerie: Otevře obrazovku Galerie. Při selhání se ikona změní na symbol s upozorněním: 
		Nastavení: Otevře obrazovku Nastavení.
		Otočení videa: Stiskem tlačítka otočíte video signál(y) o 180 stupňů. Funkci lze deaktivovat na záložce Nastavení funkcí .
Nabídka nastavení		Funkce: Otevře obrazovku Nastavení funkcí
		Regionální nastavení: Otevře obrazovku Regionální nastavení
		Administrativní nastavení: Otevře obrazovku Administrativní nastavení
Přepínače		Přepínač v poloze vypnuto.

SKUPINA TLAČÍTEK	TLAČÍTKO	FUNKCE															
		Přepínač v poloze zapnuto. <i>Poznámka: Pokud přepínačem zapnete funkci Otočení videa, přepínač se zbarví žlutě.</i>															
Hlavní obrazovka (pravá strana) - Nabídka rozložení videa		Nabídka Rozložení videa: Otevře nabídku Rozložení videa. V této nabídce lze volit z několika různých rozložení. Tlačítko se mění dle výběru z následujících rozložení.															
		<table><tr><th colspan="4">Core 10</th><th colspan="4">Core 15</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Core 10				Core 15										
	Core 10				Core 15												
																	
		Tlačítko a ikona videosignálu: Zobrazí kanál videosignálu (A nebo B) a připojený endoskop. Zde je několik příkladů: <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
																	
	Přesunout doleva: Přesune okno s videem na levou stranu.																
	Přesunout doprava: Přesune okno s videem na pravou stranu.																
	Zavřít: Zavře okno s videem, dialogové okno nebo editor.																
Editor poznámek		Uložit: Uloží změny v editoru.															
		Zavřít: Zavře editor.															
Galerie		Export: Exportuje vybraný soubor.															
		Hvězdička: Stiskem přidáte nebo odstraníte příznak oblíbené položky u vybraného souboru.															
		Odstranit: Odstraní vybraný soubor.															
		Zpět: Návrat na předchozí obrazovku.															
		Vybrat vše: Při prohlížení souborů v Galerii zaškrtnutím tohoto políčka vyberete všechny soubory v řádku.															
		Miniatura poznámky: Označuje soubor typu poznámka k pacientovi. Stiskem otevřete prohlížeč poznámek k pacientům.															
		Miniatura videa: Označuje videosoubor. Výběrem otevřete videopřehrávač.															
		Roztáhnout: Zvětší video na celou obrazovku.															
		Standardní zobrazení: Obnoví normální velikost videa.															
Export médií		Kopírovat: Po stisku tlačítka Export můžete výběrem této možnosti kopírovat vybrané soubory na jednotku USB. V interní paměti se ponechá kopie.															

SKUPINA TLAČÍTEK	TLAČÍTKO	FUNKCE
		Přesunout: Po stisku tlačítka Export můžete výběrem této možnosti přesunout vybrané soubory na jednotku USB. Tím odstraníte jejich kopii z interní paměti, ledaže je soubor označen jako oblíbená položka.
Galerie— videopřehrávač		Restart: Skočí zpět na začátek videa.
		Skočit zpět: Vratí vybrané video zpět o 20 % jeho délky.
		Přehrát video: Přehraje vybrané video. Během přehrávání se změní na tlačítko pozastavení.
		Pozastavit video: Pozastaví přehrávání videa. Během pozastavení se změní na tlačítko přehrávání.
		Skočit vpřed: Přeskočí ve vybraném videu dopředu o 20 % jeho délky.
		Hlasitost (přepínač): Přepíná mezi tlačítky hlasitosti a posuvem.
		Hlasitost nahoru: Zvýší hlasitost.
		Hlasitost dolů: Sníží hlasitost.
		Ztlumit: Ztlumí hlasitost. Při ztlumené hlasitosti zruší ztlumení.
		Místo přehrávání: Zobrazuje aktuální místo ve videu. Přesunutí ikony na vodorovné ose lze skočit na konkrétní místo ve videu.

Commented [PS1]: Srov. originál – meter?

Tabulka 4. Ikony na obrazovce


IKONA	FUNKCE
	Stav baterie: Ukazuje zbývající kapacitu baterie a pokud je tento údaj k dispozici, také odhad zbývajících času použití. Další informace viz Dobíjení baterie monitoru na straně 20.
	Oblíbené položky: Nad soubory v Galerii zobrazí soubory, které byly označeny jako oblíbené položky.
	Čas do vypnutí: Přístroj se brzy vypne. Pokud jde o stav řízený funkcí Automatické vypnutí, dotykem obrazovky lze vypnutí zrušit. <i>Poznámka: Funkci Automatické vypnutí lze upravit nebo deaktivovat na obrazovce Nastavení funkcí. Další informace viz Dokončení Průvodce nastavením (Volitelné) na straně 21.</i>
	Interní paměť: Zobrazí dostupnou velikost interní paměti.
	Jednotka USB: Zobrazí dostupnou velikost paměti na jednotce USB. Zobrazí se, je-li připojena jednotka USB.
	Pozor: Označuje důležitý text.

IKONA	FUNKCE
	Jednotka USB flash: Oznamuje rozpoznání jednotky USB flash.
	Přesýpací hodiny: Upozorňuje obsluhu na nutnost vyčkat do vypnutí systému.
	Pole se jménem pacienta: Označuje textové pole pro zadání jména pacienta.
	Pole se jménem lékaře: Označuje textové pole pro zadání jména lékaře.
	Název zařízení: Označuje textové pole pro zadání názvu zařízení.
	Možnosti nahrávání: Zobrazuje nastavení záznamu videa a zvuku.
	Možnosti otočení videa: Zobrazuje nastavení pro otočení videa.
	Systémové zvuky: Zobrazuje nastavení systémových zvuků.
	Časové pásmo a letní čas: Zobrazuje nastavení časového pásma a letního času.
	Možnosti bezpečnostního kódu: Zobrazuje nastavení bezpečnostního kódu.
	Časová razítka videa: Zobrazuje nastavení pro časová razítka videa.
	Časová razítka rychlých snímků: Zobrazuje nastavení pro časová razítka rychlých snímků.
	Možnosti data: Zobrazuje nastavení systémového data.
	Časový editor: Ikona pro časový editor.
	Ukazatel nabíjení: Zobrazí se při připojení monitoru k napájecímu adaptéru.
	Automatické vypnutí: Zobrazuje nastavení pro Automatické vypnutí.
	Tepová frekvence: Zobrazí se při připojení externího pulzního oxymetru k monitoru a načítání dat od pacienta.
	Možnosti polí s poznámkami: Zobrazuje nastavení pro pole s poznámkami.
	Tovární nastavení: Zobrazuje možnost vrátit nastavení systému do tovární konfigurace.

Obrázek 1. Čelní panel monitoru zařízení GlideScope Core




Obrázek 2. Zadní panel monitoru zařízení GlideScope Core

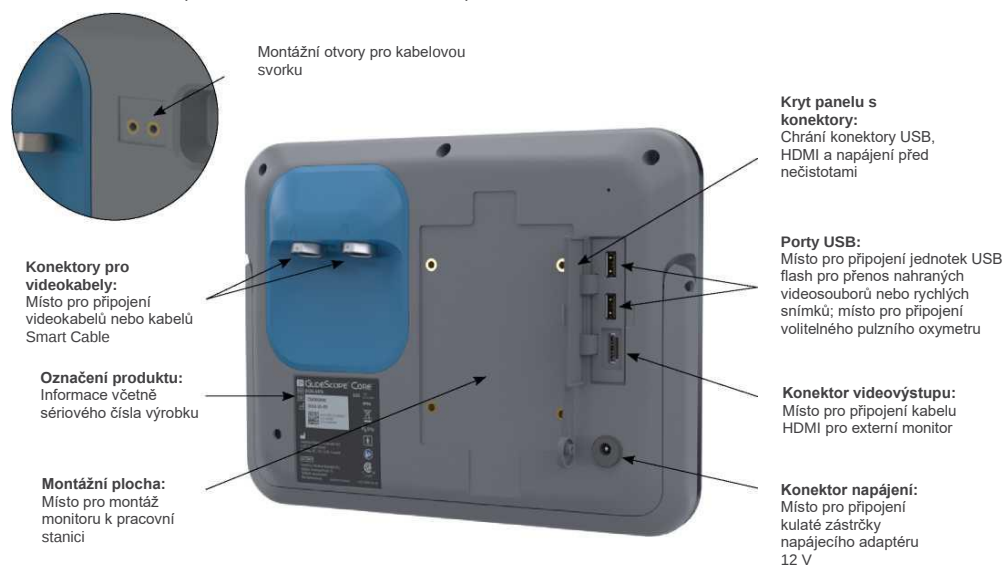

FUNKCE SYSTÉMU

HLAVNÍ OBRAZOVKA

Na Hlavní obrazovce* se zobrazují systémové informace a odkazy na různé možnosti a nabídky.

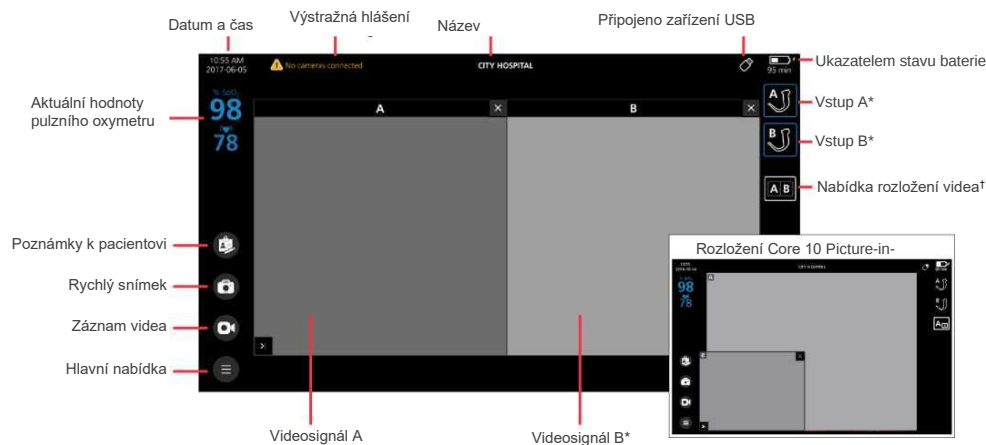

STAVOVÝ ŘÁDEK

Stavový řádek je umístěn v horní části obrazovky. Zobrazuje se trvale a podle aktuální obrazovky nabízí následující informace:

- Datum a čas
- Výstražná hlášení
- Název zařízení
- Stav systému nebo úlohy
- Stav připojení USB
- Stav baterie a přibližný zbývajících čas
- Ovládací prvky (Galerie)
- Filtr oblíbených položek (Galerie)

LEVÁ LIŠTA

Levá lišta umožňuje přístup k tlačítkům Hlavní nabídka, Poznámky k pacientovi a Rychlý snímek. Dále je zde tlačítko Záznam videa, pokud je toto zobrazení aktivováno v nastavení.

Na monitor lze také zobrazit SpO₂ a tepovou frekvenci, pokud je připojen externí pulzní oxymetr Nonin 3231 USB. Aktuální hodnoty se zobrazují v horní části lišty.

Poznámka: Je-li k monitoru připojen pulzní oxymetr, avšak nenačítají se žádná data o pacientovi, namísto hodnot se zobrazí dvě pomlčky (--).

* Duální rozložení GlideScope Core 15 Dual View.

† Zobrazuje se pouze při připojení dvou kamer k monitoru.

DŮLEŽITÉ

Zobrazení hodnot SpO₂ na monitoru může sloužit jako praktický sekundární displej. Není určeno ke stanovení diagnózy pacienta. Při použití pulzního oxymetru USB se prosím řiďte návodem k použití k tomuto zařízení značky Nonin.

PRAVÁ LIŠTA

Na pravé liště se zobrazuje ikona připojených endoskopů. Je-li připojen více než jeden endoskop, zobrazí se nabídka Rozložení videa. Další informace o možnostech rozložení videa viz [Upravit rozložení videa](#) na straně 35.


VIDEOSIGNÁL

Nejdůležitější funkcí na Hlavní obrazovce je videosignál. Zde se zobrazuje video přenášené z připojených endoskopů. Jsou-li připojeny dva endoskopy, oba videosignály lze zobrazit současně. Tuto oblast je rovněž možno zrcadlit na externím monitoru prostřednictvím kabelu HDMI.

GALERIE

V Galerii máte možnost prohlížet videa a rychlé snímky, které byly na monitoru dříve pořízeny a uloženy. Můžete zde také prohlížet poznámky k pacientovi, zadávat oblíbené položky a exportovat soubory na jednotku USB flash jako zálohu nebo pro účely prohlížení na počítači. Další informace k použití Galerie viz [Použití Galerie](#) na straně 37.

Obrázek 3. Hlavní obrazovka Galerie

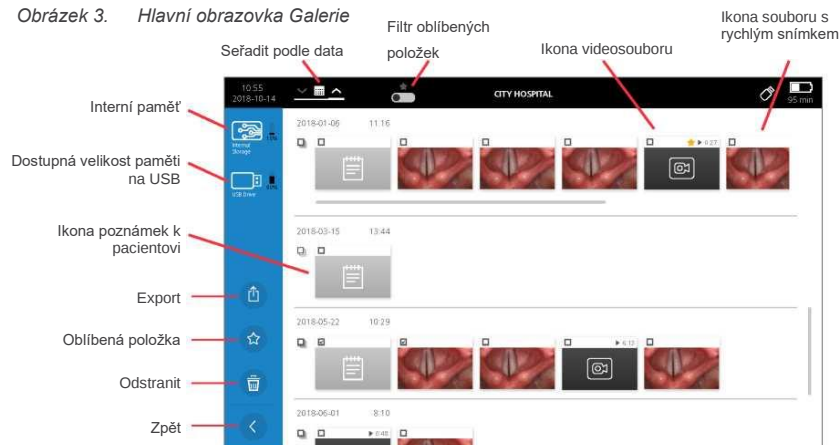

NASTAVENÍ



Před provedením následujících operací si prosím přečtěte část [Varování a upozornění](#).

DŮLEŽITÉ

Případná montáž monitoru Core 15 k pracovní stanici systému Core je možná pouze na díl s katalogovým číslem 0800-0636.

Před prvním použitím systému je třeba zkontrolovat všechny součásti, systém nastavit a provést funkční zkoušku dle doporučení společnosti Verathon. Provedte následující postupy:

1. **Proveďte úvodní kontrolu** - Zkontrolujte, zda systém nevykazuje zjevné fyzické poškození, k němuž mohlo dojít při přepravě.
2. **Proveďte montáž systému (volitelné)** - Připevněte monitor k pracovní stanici.
3. **Nabijte baterii monitoru** - Systém můžete používat i během nabíjení baterie.
4. **Připojte videokabel a endoskop** - Připojte k monitoru vhodný videokabel a poté k videokabelu připojte endoskop.
5. **Připojte k externímu monitoru (volitelné)** - Připojte monitor k externímu zobrazovači, například větší obrazovce, pomocí kabelu HDMI.
6. **Dokončete Průvodce nastavením (volitelné)**-Průvodce nastavením vás provede úvodní konfigurací systému s nastavením data, času, bezpečnostního kódu apod.
7. **Konfigurace uživatelských nastavení (volitelné)**-Zadejte údaje specifické pro vaše zdravotnické zařízení a nastavte parametry, jako jsou datum a čas, časová razítka videa a jiná administrativní nastavení.
8. **Proveďte funkční zkoušku**-Před prvním použitím zařízení proveďte funkční zkoušku a ověřte, zda systém funguje správně.

POSTUP 1. PROVEĎTE ÚVODNÍ KONTROLU

Společnost Verathon doporučuje, aby po doručení systému osoba obeznámená s tímto přístrojem provedla podrobnou vizuální kontrolu systému, zda nevykazuje zjevné fyzické poškození, k němuž mohlo dojít při přepravě.

1. Podle přibaleného dodacího listu zkontrolujte, zda jste se k systému obdrželi správné součásti.
2. Zkontrolujte také případné poškození součástí.
3. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozeny, informujte přepravce a zákaznickou podporu společnosti Verathon nebo svého místního zástupce. Kontaktní informace najdete na stránce verathon.com/global-support.

POSTUP 2. MONTÁŽ SYSTÉMU (VOLITELNÉ)

Pokud se rozhodnete připojit systém, můžete použít některou z následujících konfigurací:

- Základní pracovní stanice GlideScope Core Basic Workstation (**Obrázek 4**) - Toto řešení usnadňuje přesun systému z jednoho místa na druhé.
- Premiová pracovní stanice GlideScope Core Premium Workstation (**Obrázek 5**) - Tato řešení usnadňují přesun systému z jednoho místa na druhé a také umožňují upravit polohu monitoru podle vašich potřeb.

Obrázek 4. Základní pracovní stanice



Obrázek 5. Premiová pracovní stanice



Základní i premiová pracovní stanice je v blízkosti držáku monitoru vybavena svorkou pro svedení kabeláže. Tato pomůcka přidržuje kabely u monitoru v době použití; v ostatních případech se díky ní s kabely snadno manipuluje.

Obrázek 6. Funkce pracovní stanice



MONTÁŽ MONITORU K PRACOVNÍ STANICI

1. Smontujte pracovní stanici podle přibaleného návodu.
2. Při montáži upínací destičky se ujistěte, že všechny (4) šrouby jsou pevně utaženy a upínací destička je bezpečně připevněna k monitoru.




Poznámka: Šrouby a šestihranný klíč jsou součástí dodávky pracovní stanice.

3. Zasuňte upínací destičku monitoru do rychloupínacího držáku. Při správné orientaci dosedne monitor bezpečně do držáku a zámek upínací destičky zacvakne do rychloupínacího držáku.




4. K demontáži monitoru stiskněte zámek a vysuňte monitor směrem nahoru.

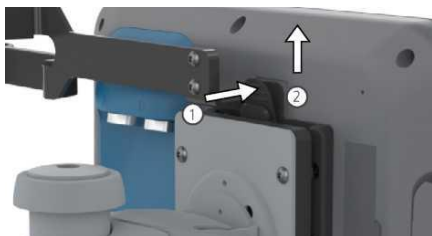

NASTAVENÍ NAPĚTÍ NAKLÁPĚCÍHO MECHANISMU MONITORU

Je-li obtížné upravit náklon monitoru nebo se monitor sám sklápí dolů, je třeba upravit napětí naklápěcího mechanismu.

- Pomocí šestihranného klíče velikosti 4 mm v případě prémiové pracovní stanice nebo křížového šroubováku u stanice základní zvýšte napětí otočením stavěcího šroubu ve směru hodinových ručiček, nebo napětí otočením proti směru hodinových ručiček uvolněte.

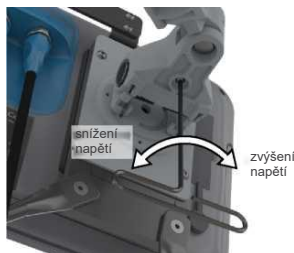


NASTAVENÍ SÍLY RAMENE PRÉMIOVÉ PRACOVNÍ STANICE

Při použití prémiové pracovní stanice může být zapotřebí v závislosti na kombinaci hmotnosti monitoru a připevněného příslušenství nastavit sílu zvedací pružiny pohyblivého ramene.

1. Zvedněte rameno do nejvyšší polohy.



2. Pomocí šestihranného klíče velikosti 4 mm zvýšte sílu zdvihu ramene otočením stavěcího šroubu pružiny ve směru hodinových ručiček, nebo ji otočením proti směru hodinových ručiček snižte. *Při optimálním nastavení zůstává rameno v téže poloze bez samovolného zvedání či klesání.*

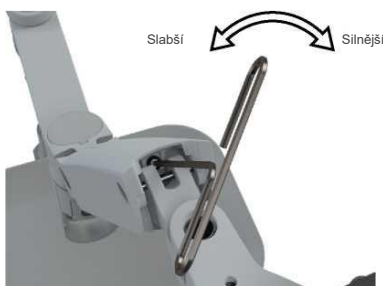

POSTUP 3. NABÍTÍ BATERIE MONITORU



Před provedením následující operace si prosím přečtěte část [Varování a upozornění](#).

Monitor systému GlideScope Core je vybaven vnitřní lithiovou baterií. Společnost Verathon doporučuje plné nabití baterie před prvním použitím.

Za normálních provozních podmínek vydrží baterie na jedno plné nabití přibližně 135 minut provozu systému Core 10 a 90 minut u systému Core 15. Z hlediska životnosti baterie je optimální zajistit před použitím monitoru v režimu napájení z baterie její plné nabití. Baterii byste měli nabíjet při teplotách od 10 do 35°C (50 až 95°F).

Pod ikonou baterie se zobrazuje odhad zbývajících času. Tento čas závisí na odběru z baterie a může se lišit podle počtu připojených součástí a prvků příslušenství. Při vybití baterie se indikátor stavu postupně zmenšuje a vždy při dosažení určité úrovně mění barvu.

Obrázek 7. Ikony stavu baterie



Červený ukazatel baterie: Zbývá 0 % až 10 % kapacity baterie. Baterii je nutno dobít.



Žlutý ukazatel baterie: Zbývá 11 % až 30 % kapacity baterie.



Bílý ukazatel baterie: Zbývá 31 % až 100 % kapacity baterie.

1. Připojte napájecí adaptér videomonitoru 12 V DC k napájecímu kabelu.
2. Na zadním panelu monitoru sejměte kryt napájecího konektoru a připojte napájecí adaptér 12 V DC do napájecího konektoru.




3. Napájecí zdroj zastrčte do elektrické zásuvky splňující požadavky na provoz zdravotnických zařízení.
4. Nechte baterii nabít. Plné nabití baterie může trvat až 4 hodiny.

POSTUP 4. DOKONČENÍ PRŮVODCE NASTAVENÍM (VOLITELNÉ)

Při prvním spuštění monitoru se spustí průvodce, který vás provede úvodním nastavením. Pokud jste průvodce již dokončili nebo jste se rozhodli jej přeskočit, můžete veškerá nastavení upravit v nabídce [Konfigurace uživatelských nastavení \(volitelné\)](#) na straně 24.

V levé části obrazovky se zobrazí indikátor průběhu průvodce nastavením. Pro návrat k předchozímu parametru stiskněte tlačítko **Zpět** . Pro ukončení průvodce stiskněte tlačítko **Zavřít** .

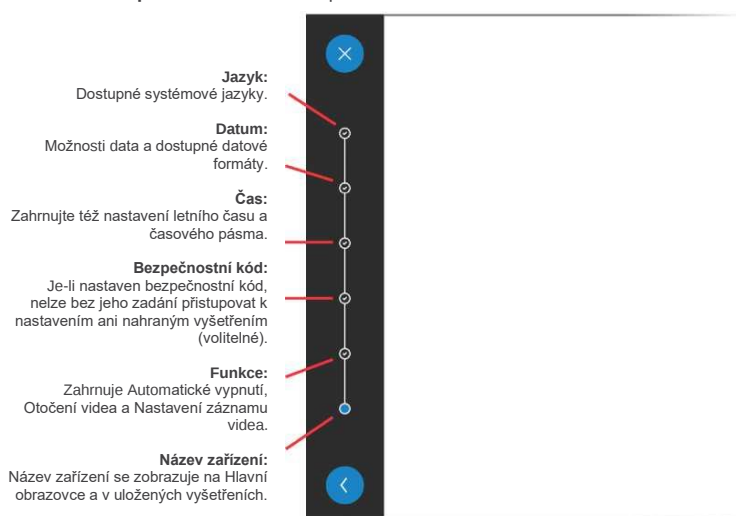

1. Vyberte systémový jazyk a pokračujte stiskem potvrzovacího tlačítka.



2. Nastavte datum a formát data a poté pokračujte stiskem potvrzovacího tlačítka.



3. Nastavte čas, časové pásmo a požadovanou volbu nastavení letního času a poté pokračujte stiskem potvrzovacího tlačítka.



4. Chcete-li zadat bezpečnostní kód, zadejte jej a poté stiskněte potvrzovací tlačítko. Potvrďte kód opětovným zadáním a stiskněte potvrzovací tlačítko. Je-li kód potvrzen, průvodce postoupí k dalšímu nastavení.*

Pokud si nepřejete bezpečnostní kód používat, stiskem přepínače Bezpečnostní kód nastavte **Vypnuto** a poté stiskem potvrzovacího tlačítka pokračujte k dalšímu nastavení.

Poznámka: Je-li bezpečnostní kód aktivován, nelze bez jeho zadání přistupovat ke Galerii ani k nastavení systému.

Obrázek 8. Bezpečnostní kód aktivní



Obrázek 9. Bezpečnostní kód neaktivní




* Pokud jste bezpečnostní kód zapomněli, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti Verathon. Kontaktní informace najdete na stránce verathon.com/global-support.

5. Chcete-li aktivovat nebo upravit určitý parametr, stiskem příslušného přepínače nastavte **Zapnuto** . K dispozici jsou následující možnosti:

- **Možnosti Automatického vypnutí:** Aktivace a deaktivace funkce Automatického vypnutí a nastavení časového intervalu.
- **Možnosti Otočení videa:** Aktivace a deaktivace nabídky Otočení videa.
- **Možnosti nastavení záznamu videa a zvuku:** Aktivace a deaktivace záznamu videa a zvuku.

Po dokončení konfigurace pokračujte stiskem potvrzovacího tlačítka k dalšímu nastavení.

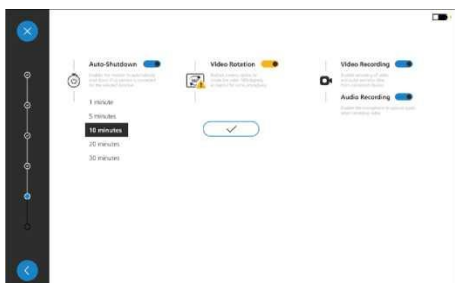

6. Zadejte název monitoru pro snazší identifikaci. Není-li název zapotřebí, pokračujte stiskem potvrzovacího tlačítka na závěrečnou potvrzovací obrazovku.



7. Po dokončení průvodce nastavením se stiskem potvrzovacího tlačítka vrátíte na Hlavní obrazovku.



8. Chcete-li konfigurovat systémová nastavení, která nejsou součástí Průvodce nastavením, nebo změnit nastavení stávající, použijte [Postup 5, Konfigurace uživatelských nastavení \(volitelné\)](#).

POSTUP 5. KONFIGURACE UŽIVATELSKÝCH NASTAVENÍ (VOLITELNÉ)

V nabídce Nastavení můžete konfigurovat nebo měnit následující systémová nastavení:


- Automatické vypnutí
 - Otočení videa
 - Systémové zvuky
 - Záznam videa
- Záznam zvuku
 - Časová razítka videa
 - Datum
 - Formát data
- Čas
 - Letní čas
 - Časové pásmo
 - Formát času
- Název zařízení
 - Bezpečnostní kód
 - Pole s poznámkami

Jednotlivá nastavení se aktivují a deaktivuje přesunem přepínače doprava (zapnuto), nebo doleva (vypnuto). Je-li určitá volba zapnuta, mohou se zobrazit další možnosti konfigurace.

ZÁLOŽKA NASTAVENÍ FUNKCÍ

Na záložce **Nastavení funkcí** můžete měnit nastavení pro Časová razítka videa, Systémové zvuky, Automatické vypnutí, Otočení videa a Záznam videa.


1. Z Hlavní obrazovky se na Záložku **Nastavení funkcí** dostanete stiskem tlačítka **Hlavní nabídka** a poté stiskem tlačítka **Nastavení**.

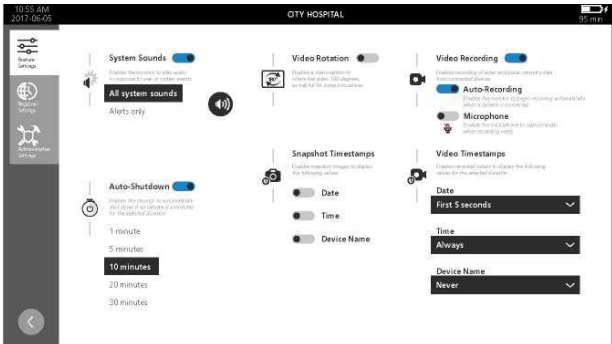

Tabulka 5. Nastavení funkcí

NASTAVENÍ	FUNKCE
Systémové zvuky	Aktivace a deaktivace přehrávání zvukových efektů při stisku tlačítek. Při aktivaci nabízí možnosti pro všechny systémové zvuky, nebo pouze výstrahy.
Automatické vypnutí	Aktivace a deaktivace automatického vypnutí systému. Je-li funkce aktivní a nejsou připojeny žádné endoskopy, monitor se automaticky vypne po zadaném časovém intervalu. Při aktivaci se zobrazí dostupná nastavení časovače.
Otočení videa	Aktivace a deaktivace tlačítka pro otáčení videa v hlavní nabídce.
Časová razítka rychlých snímků	Nastavení data, času a názvu zařízení pro časová razítka rychlých snímků.
Záznam videa	Aktivace a deaktivace tlačítka nahrávání na Hlavní obrazovce. Je-li funkce aktivní, zobrazí se nastavení pro Automatické nahrávání, Mikrofon a Časová razítka videa.
Automatické nahrávání	Aktivace a deaktivace funkce automatického zahájení záznamu videa.
Mikrofon	Aktivace a deaktivace záznamu zvuku při nahrávání videa.
Časová razítka videa	Nastavení data, času a názvu zařízení pro časová razítka videa. Nastavit lze trvalé zobrazení, zobrazení po dobu prvních pěti sekund nebo zobrazení zcela vypnout.

2. Chcete-li na záložce Nastavení funkcí změnit hlasitost Systémových zvuků, stiskněte tlačítko **Reproduktor** . Zobrazí se ovladače hlasitosti.

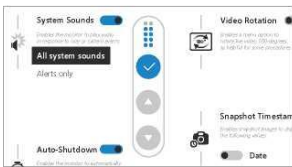


3. Tlačítka **Zvýšení hlasitosti**  a **Snížení hlasitosti**  upravte hlasitost a nastavení uložte stiskem potvrzovacího tlačítka.

ZÁLOŽKA REGIONÁLNÍ NASTAVENÍ

Na záložce **Regionální nastavení** můžete měnit datum, formát data, čas, formát času, nastavení letního času a časové pásmo.

1. Z Hlavní obrazovky se na Záložku **Regionální nastavení** dostanete stiskem tlačítka **Hlavní nabídka**  a poté stiskem tlačítka **Nastavení** .
2. Stiskněte záložku **Regionální nastavení**. Zobrazí se Regionální nastavení.

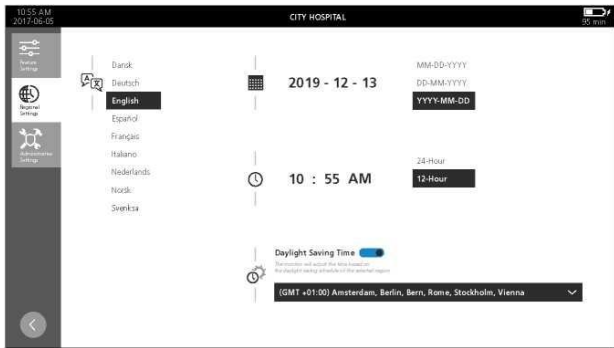


Tabulka 6. Regionální nastavení

NASTAVENÍ	FUNKCE
Datum	Nastavení systémového data.
Formát data	Nastavení formátu data.
Čas	Nastavení systémového času.
Formát času	Přepíná formát času monitoru mezi 12hodinovým a 24hodinovým.
Letní čas	Aktivace a deaktivace letního času.
Seznam časových pásem	Rozevírací nabídka pro nastavení místního časového pásma.

ZÁLOŽKA ADMINISTRATIVNÍ NASTAVENÍ

Na záložce **Administrativní nastavení** můžete měnit nastavení pro Pole s poznámkami, Název zařízení a Bezpečnostní kód, a dále pak Statistiku použití monitoru a Počet zapnutí monitoru a aktuálně připojených endoskopů.

1. Z Hlavní obrazovky se na Záložku **Administrativní nastavení** dostanete stiskem tlačítka **Hlavní nabídka**  a poté stiskem tlačítka **Nastavení** .
2. Stisknete záložku **Administrativní nastavení**. Zobrazí se Administrativní nastavení.

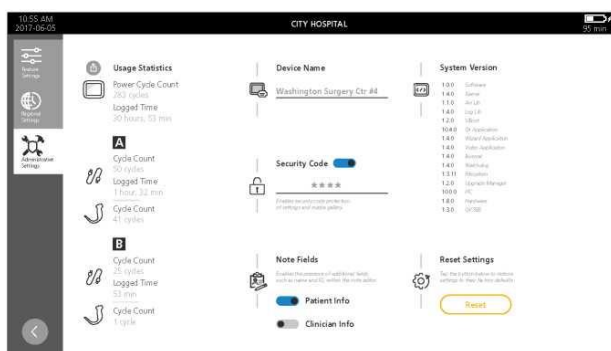

Tabulka 7. Administrativní nastavení

NASTAVENÍ	FUNKCE
Statistika použití	Zobrazí informace, jako je doba přihlášení a počet zapnutí.
Název zařízení	Nastavení názvu zařízení, který se zobrazí ve stavovém řádku v horní části obrazovky a v časovém razítku videa a rychlého snímku, je-li funkce Časová razítka aktivní. Další informace o Časových razítkách viz Záložka Nastavení funkcí na straně 24.
Bezpečnostní kód*	Nastavení bezpečnostního kódu; je-li kód aktivní, je třeba jej zadat pro přístup k Nabídce nastavení a pro vstup do Galerie.
Pole s poznámkami	Aktivace doplňkových polí v editoru poznámek, jako jsou Informace o lékaři a Informace o pacientovi.
Verze systému	Zobrazí verzi softwaru pro různé součásti systému.
Tovární nastavení	Vrátí všechna nastavení do výchozí tovární konfigurace.

* Pokud jste bezpečnostní kód zapomněli, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti Verathon a vyžádejte si jednotku USB flash pro resetování bezpečnostního kódu. Kontaktní informace najdete na stránce verathon.com/global-support


POSTUP 6. PŘIPOJENÍ VIDEOKABELU A ENDOSKOPU

Endoskop se k monitoru připojuje videokabelem, který zajišťuje napájení endoskopu a přenáší videodata z kamery do monitoru.

Tento postup obsahuje základní pokyny k připojení kompatibilních videokabelů a endoskopů k monitoru. Podrobné informace o kabelech a endoskopech najdete v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940) nebo u oddělení zákaznické podpory společnosti Verathon.

Na následujících obrázcích jsou znázorněny úvodní typy rozložení videa při připojení jednoho nebo dvou endoskopů k monitoru. Chcete-li rozložení změnit po připojení endoskopů, postupujte podle části [Upravit rozložení videa](#) na straně 35.



Jestliže monitor nerozpozná připojený endoskop, zobrazí se následující obrazovka. Po připojení endoskopu se na obrazovku promítne video z kamery.

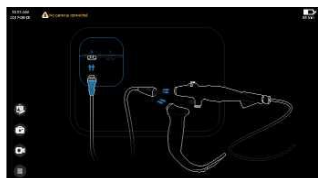


Bez ohledu na to, který videovstup je použit, se při připojení jediného endoskopu příslušný videosignál zobrazí uprostřed.



Při připojení dvou endoskopů k monitoru systému Core se videosignály zobrazí vedle sebe, pokud používáte monitor Core 15 a funkci duálního zobrazení GlideScope Core Dual View, nebo jako obraz v obraze, pokud se jedná o monitor Core 10.

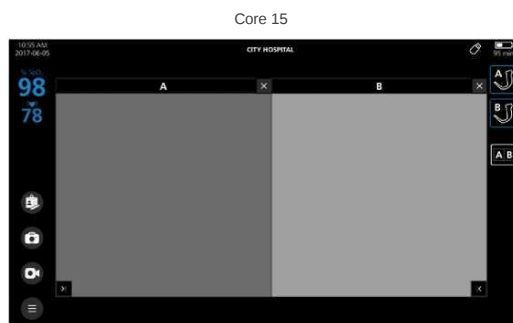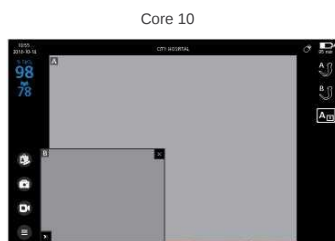


1. Natočte kabel tečkou k tečce na videokonektoru A nebo B na monitoru a kabel zastrčte až do konce. Tím je konektor připojen k monitoru.

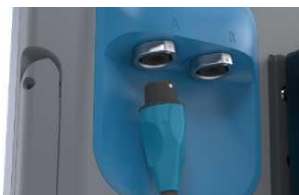

2. K odpojení videokabelu přidržte konektor kabelu jednou rukou a druhou rukou držte monitor; pak zatáhněte. Tím odpojíte kabel od monitoru.

VOLITELNÁ MOŽNOST 1. VIDEOKABEL GLIDESCOPE CORE VIDEO CABLE

1. Přiložte videokabel ke konektoru endoskopu značkami k sobě a poté videokabel zastrčte do konektoru endoskopu až do konce. Uslyšíte cvaknutí na znamení, že kabel je pevně připojen.

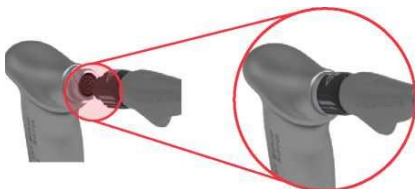

2. K odpojení endoskopu od videokabelu přidržte endoskop jednou rukou, otočte zajišťovacím kroužkem kabelu ve směru šipky na kroužku a zatáhněte. Endoskop se odpojí od kabelu.

VOLITELNÁ MOŽNOST 2. GLIDESCOPE CORE SMART CABLE

Při připojování kabelu doporučujeme ponechat sterilní jednorázové součásti v původním obalu, dokud nejste připraveni k jejich použití. Zařízení tak zůstane co nejčistší.

1. Přiložte videokabel ke konektoru endoskopu značkami k sobě a poté videokabel zastrčte do konektoru endoskopu až do konce.



2. K odpojení endoskopu od videokabelu přidržte konektor kabelu jednou rukou a druhou rukou držte tělo endoskopu; pak zatáhněte. Endoskop se odpojí od kabelu.

VOLITELNÁ MOŽNOST 3. GLIDESCOPE CORE ONETOUCH SMART CABLE

Při připojování kabelu doporučujeme ponechat sterilní jednorázové příslušenství v původním obalu, dokud nejste připraveni k jeho použití. Zařízení tak zůstane co nejčistší.

- Přiložte videokabel ke konektoru endoskopu značkami k sobě a poté videokabel zastrčte do konektoru

endoskopu až do konce.



POSTUP 7. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ USB (VOLITELNÉ)

Po připojení jednotky USB do jednoho z portů USB můžete exportovat vyšetření uložená v interní paměti. Porty umožňují také připojení externího pulzního oxymetru Nonin 3231 USB. Hodnoty SpO₂ ze snímače se zobrazují na displeji systému Core jako praktická pomůcka, neměly by však být využívány pro diagnostické účely.

1. Na zadním panelu monitoru sejměte gumový kryt panelu s konektory USB a HDMI.



2. Připojte zařízení USB do jednoho z portů USB.



3. Pokud připojíte jednotku USB, na displeji se zobrazí ikona USB  na znamení, že jednotka je připojena a připravena k použití.

Pokud používáte pulzní oxymetr, zobrazí se na obrazovce hodnoty SpO₂ z jeho snímače.

POSTUP 8. PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO MONITORU (VOLITELNÉ)



Před provedením následující operace si prosím přečtěte část [Varování a upozornění](#).

DŮLEŽITÉ

Aby systém udržel elektromagnetické rušení (EMI) ve schválených mezích, musí být používán s kabely, součástmi a prvky příslušenství schválenými nebo dodanými společností Verathon. Další informace viz části [Součásti systému a příslušenství](#) a [Specifikace součástí](#). Při použití jiného příslušenství či kabelů, než uvádí nebo dodává společnost Verathon, může dojít ke zvýšení vyzařování nebo snížení odolnosti systému.

Pomocí kabelu HDMI můžete videomonitor připojit k externímu monitoru schválenému pro zdravotnické použití.

Poznámka: Kvalita obrazu na externím monitoru se může lišit podle jeho rozlišení.

1. Na zadním panelu monitoru sejměte kryt panelu s konektory USB a HDMI.



2. Připojte jeden konec kabelu HDMI k portu HDMI.




3. Připojte opačný konec kabelu HDMI k portu HDMI na externím monitoru schváleném pro zdravotnické použití.
4. Nechcete-li nadále vysílat video na externí monitor, odpojte libovolný konec kabelu HDMI.

POSTUP 9. PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY

Před prvním použitím zařízení proveďte následující funkční zkoušku a ověřte, zda systém funguje správně. Pokud váš systém nefunguje dle popisu níže, kontaktujte prosím svého zástupce zákaznické podpory společnosti Verathon.

1. Plně nabijte baterii monitoru (tento proces trvá přibližně 4 hodiny).
2. Připojte k monitoru videokabel a endoskop dle pokynů v části [Připojení videokabelu a endoskopu](#) na straně 27.
3. Stiskněte **Vypínač** . Monitor se zapne.
4. Podívejte se na obrazovku monitoru a zkontrolujte, zda aktuální obraz pochází z endoskopu.

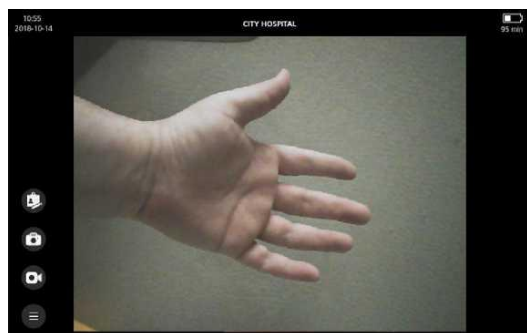

Poznámka: V levém horním rohu monitoru může dojít k mírnému narušení obrazu lžice a podél horního okraje se může objevit tenká čára. Tyto hrany lžice se v obraze objevují z důvodu použití širokoúhlého objektivu kamery ve videolaryngoskopu. Tento obraz slouží jako reference při intubaci a potvrzuje správnou orientaci obrazu na monitoru.

5. Stiskněte tlačítko **Záznam** . Tlačítko pro záznam se zbarví červeně na znamení, že monitor zahájil nahrávání.
6. Znovu stiskněte tlačítko **Záznam** . Nahrávání se zastaví.
7. Stiskněte tlačítko **Rychlý snímek** . Pořídí se snímek oblasti se zobrazením videosignálu.
8. Na **Hlavní obrazovce** stiskněte tlačítko **Hlavní nabídka**  a poté stiskněte tlačítko **Galerie**  a zkontrolujte, zda se video a rychlý snímek zaznamenaly úspěšně. Další informace k použití Galerie viz [Použití Galerie](#) na straně 37.

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Před použitím zařízení proveďte nastavení dle pokynů v předchozí kapitole a zkontrolujte nastavení provedením Kroku 1 až Kroku 4 postupu [Provedení funkční zkoušky](#) na straně 32.



Před provedením následujících operací si prosím přečtěte část [Varování a upozornění](#).

V této kapitole najdete následující části:

- [Příprava systému](#)
- [Použití pulzního oxymetru USB](#)
- [Změny rozložení videa](#)
- [Otočení obrazu](#)
- [Záznam videa nebo pořízení rychlého snímku](#)
- [Použití Galerie](#)

POSTUP 1. PŘÍPRAVA SYSTÉMU

V tomto postupu vyberete a připojíte videozařízení a příslušenství USB vhodné pro daného pacienta, zapnete systém a zkontrolujete, zda systém funguje správně. Seznam všech kompatibilních endoskopů najdete v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940).

1. Pokud používáte opakovaně použitelný endoskop, ujistěte se, že každá součást byla řádně vyčištěna, dezinfikována nebo sterilizována dle pokynů v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940).
2. S využitím informací v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940), po klinickém posouzení pacienta a na základě zkušeností a úsudku lékaře vyberte endoskop, který je vhodný pro daného pacienta a zákrok.
3. Připojte videokabel vybraného endoskopu k monitoru dle pokynů v části [Připojení Videokabelu a endoskopu](#) na straně 27.
4. Stiskněte **Vypínač** . Videomonitor se zapne.
Poznámka: Pokud monitor kdykoli při použití přestane reagovat, stiskněte vypínač a 10 sekund jej přidržte. Systém se restartuje.
5. Ujistěte se, že baterie je plně nabitá. V případě nutnosti připojte monitor přímo ke zdroji napětí.
6. Na obrazovce monitoru zkontrolujte, zda aktuální obraz pochází z endoskopu. V obraze z některých videolaryngoskopů může být v levém horním rohu nebo při horním okraji obrazovky patrná úzká část lžice.

POSTUP 2. POUŽITÍ PULZNÍHO OXYMETRU USB

DŮLEŽITÉ

Zobrazení hodnot SpO_2 na monitoru může sloužit jako praktický sekundární displej. Není určeno ke stanovení diagnózy pacienta. Při použití pulzního oxymetru USB se prosím řiďte návodem k použití k tomuto zařízení značky Nonin.

Monitor systému GlideScope Core je kompatibilní s externím pulzním oxymetrem Nonin 3231 USB. Je-li připojen, lze v levém horním rohu obrazovky zobrazit hodnoty SpO_2 a tepové frekvence.



1. Na zadním panelu monitoru sejměte gumový kryt panelu s konektory USB a HDMI.



Kryt panelu s konektory

2. Připojte pulzní oxymetr USB do jednoho z portů USB.




Porty USB

3. Je-li zařízení připojeno, na obrazovce se objeví ikona USB .
4. Umístěte externí pulzní oxymetr Nonin 3231 USB dle pokynů výrobce. Po umístění se na obrazovce objeví hodnoty SpO_2 z tohoto přístroje.

POSTUP 3. ZMĚNY ROZLOŽENÍ VIDEOA

Jsou-li k monitoru připojeny dva endoskopy, máte možnost volit z různých rozložení videa. Tato nabídka umožňuje výběr, jak se videosignály zobrazí.

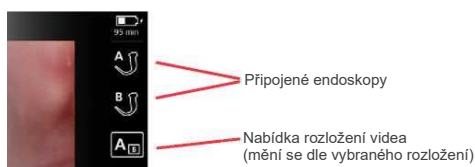

1. Jakmile máte k monitoru připojeny dva endoskopy, můžete buď zobrazit pouze jeden videosignál stiskem ikony příslušného endoskopu, nebo si vybrat konkrétní konfiguraci stiskem tlačítka Nabídka rozložení videa a výběrem jedné z následujících konfigurací pro zobrazení videosignálů:

MONITOR	TLAČÍTKO	KONFIGURACE
Core 10 a Core 15		Hlavní videosignál: Vstup A Vedlejší videosignál: Vypnuto
		Hlavní videosignál: Vstup B Vedlejší videosignál: Vypnuto
		Hlavní videosignál: Vstup A Vedlejší videosignál: Vypnuto
		Hlavní videosignál: Vstup B Vedlejší videosignál: Vypnuto
Core 10		Hlavní videosignál: Vstup A Vedlejší videosignál: Vstup B
		Hlavní videosignál: Vstup B Vedlejší videosignál: Vstup A
Core 15		Levý videosignál: Vstup A Pravý videosignál: Vstup B
		Pravý videosignál: Vstup B Levý videosignál: Vstup A

2. Pokud zobrazujete oba videosignály a přejete si změnit polohu okna s videem, stiskněte tlačítko **Přesunout doleva** nebo **Přesunout doprava** v jednom z dolních rohů okna s videem.
3. Pro zavření okna s videem stiskněte tlačítko **Zavřít** v pravém horním rohu okna s videem nebo z nabídky **Rozložení videa** vyberte možnost zobrazit pouze jeden videosignál.
4. Normální zobrazení videa obnovíte stiskem tlačítka **Standardní zobrazení** .

POSTUP 4. OTOČENÍ OBRAZU

Obraz lze v případě potřeby otočit o 180 stupňů. Možnost zobrazení tlačítka pro otočení obrazu lze aktivovat nebo deaktivovat v uživatelském nastavení. Změna tohoto nastavení je popsána v části [Konfigurace uživatelských nastavení \(volitelné\)](#) na straně 24.

1. Stiskněte tlačítko **Hlavní nabídka**  a poté stiskněte tlačítko **Otočení videa** . Videosignál včetně videa vysílaného na externí monitor se otočí o 180 stupňů a v pravé části obrazovky se zobrazí žluté tlačítko **Otočení videa** .
2. Pro obnovení normální orientace videosignálu stiskněte tlačítko **Otočení videa**  v pravé části obrazovky.

Poznámka: Jsou-li k monitoru připojeny dvě kamery, zobrazí se tlačítko Otočení videa pod ikonami pro rozložení videa. Také ikony pro rozložení videa se zvýrazní žlutě.

POSTUP 5. ZÁZNAM VIDEO NEBO POŘÍZENÍ RYCHLÉHO SNÍMKU

DŮLEŽITÉ

Videosignály pořizované a používané tímto systémem jsou určeny výhradně k polohování nástrojů. Nepoužívejte záznamy a snímky pořizené tímto systémem k diagnostickým účelům.

Monitor je vybaven funkcí záznamu videa a zvuku a nabízí také možnost ukládat rychlé snímky živého obrazu na monitoru a zapsat poznámky o aktuálním použití. Systém tato data ukládá do své interní paměti. Nahrávky a snímky lze prohlížet přímo na monitoru nebo je exportovat na jednotku USB flash a prohlížet je na počítači.

AUTOMATICKÝ ZÁZNAM VIDEO A ZVUKU

Ve výchozím nastavení je automatický záznam videa a zvuku deaktivován. Je-li automatický záznam videa aktivní, monitor zahájí nahrávání, jakmile je připojen endoskop nebo je monitor zapnut s již připojeným endoskopem. Je-li aktivní záznam zvuku, nahrává systém spolu s videem i zvuk.

1. Aktivaci automatického záznamu videa a zvuku z Hlavní obrazovky provedete stiskem tlačítka **Hlavní nabídka**  a poté stiskem tlačítka **Nastavení**  pro zobrazení záložky **Nastavení funkcí**.
2. Na záložce **Nastavení funkcí** se ujistěte, že je aktivován Záznam videa, a poté upravte možnosti automatického záznamu a mikrofonu dle potřeby.

MANUÁLNÍ ZÁZNAM A RYCHLÉ SNÍMKY

1. Pro ruční spuštění nahrávání stiskněte tlačítko **Záznam** . Spustí se nahrávání videa a uloží se do monitoru. Tlačítko **Záznam** se zbarví červeně  na znamení, že monitor zahájil nahrávání.

Je-li aktivní záznam zvuku, je na tlačítku Záznam zobrazen malý mikrofon potvrzující, že video se nahrává se zvukem.

Obrázek 10. Tlačítko Záznam s aktivní funkcí záznamu zvuku



2. Pro ukončení nahrávání stiskněte znovu tlačítko **Záznam** . Nahrávání se zastaví.
3. Pokud chcete uložit snímek živého videosignálu, stiskněte tlačítko **Rychlý snímek** . Kolem videa se na okamžik zobrazí rámeček na znamení, že snímek byl pořízen. Tuto operaci lze provést také během nahrávání videa.

Při použití monitoru GlideScope Core a kabelu OneTouch můžete ke spuštění a ukončení záznamu videa nebo pořízení rychlého snímku využít také tlačítka přímo na kabelu. Další informace k použití kabelu

OneTouch najdete v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940).

4. Chcete-li vytvořit poznámku k pacientovi, stiskněte tlačítko Editor poznámek . Editor poznámek se otevře.

Poznámka: Probíhá-li záznam videa, stiskem tlačítka Editor poznámek se video uloží a otevře se Editor poznámek.

5. Další informace k prohlížení nahraných souborů viz [Postup 6, Použití Galerie](#).

POSTUP 6. POUŽITÍ GALERIE



Před provedením následující operace si prosím přečtěte část [Varování a upozornění](#).

DŮLEŽITÉ

Během přesunu souborů z monitoru na jednotku USB nevytahujte jednotku USB flash.

VSTUP DO GALERIE

- Na Hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Hlavní nabídka**  a poté stiskněte tlačítko **Galerie** .
- Poznámka: Pokud byl pro monitor vytvořen bezpečnostní kód, zobrazí se před povolením přístupu do Galerie výzva k jeho zadání.*

SEŘAZENÍ GALERIE

- Stiskněte šipky nahoru a dolů vedle ikony **Seřadit podle data**. Při výběru se šipka zvýrazní a bíle podtrhne.

Nejnovější nahoře  Nejstarší nahoře

VÝBĚR SOUBORŮ

1. Stiskněte soubor a přidržte nebo přímo stiskněte zaškrťovací políčko. Soubor je vybrán, jakmile se v zaškrťovacím políčku v levém horním rohu miniatury objeví potvrzovací značka. Pro výběr dalších souborů nebo zrušení výběru postup opakujte.




2. Pro výběr všech souborů v řádku stiskněte tlačítko **Vybrat vše** nalevo od řádku.



OBLÍBENÉ POLOŽKY

1. Pro označení souboru jako oblíbené položky stiskněte zaškrťovací políčko pro výběr souboru nebo několika souborů a poté stiskněte tlačítko **Oblíbené položky**  na levé liště. V miniatuře se zobrazí hvězdička.

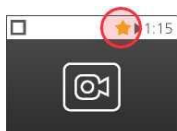

Poznámka: Soubory označené jako oblíbené položky jsou chráněny proti odstranění z monitoru. Pokud se takový soubor přesune na jednotku USB, bude na jednotku zkopírován a zůstane uložen v monitoru.

2. Pokud si přejete aktivovat nebo deaktivovat Filtr oblíbených položek ve Stavovém řádku, stiskněte příslušné tlačítko. Je-li funkce aktivní, v Galerii se zobrazí pouze soubory označené jako oblíbené položky.

Obrázek 11. Filtr oblíbených položek neaktivní



Obrázek 12. Filtr oblíbených položek aktivní



EXPORT VIDEO NEBO RYCHLÉHO SNÍMKU

1. Na zadním panelu monitoru sejměte gumový kryt panelu s konektory USB a HDMI.



Kryt panelu s konektory

2. Připojte jednotku USB flash do jednoho z portů USB.



Porty USB


3. Zkontrolujte, zda byla jednotka USB flash rozpoznána a v horní části obrazovky se zobrazila ikona USB.
4. Na Hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Hlavní nabídka** a poté stiskněte tlačítko **Galerie**.
5. Stiskem zaškrtnávacího políčka v levém horním rohu miniatury vyberte soubor nebo soubory, které chcete exportovat.
6. Stiskněte tlačítko **Export**. Zobrazí se okno Exportovat výběr.



7. Stiskněte tlačítko **Přesunout**  nebo **Kopírovat** . Soubory se přesunou nebo zkopírují na jednotku USB.
8. Po dokončení exportu soubor vytáhněte jednotku USB z monitoru. Soubory lze nyní prohlížet nebo zálohovat na počítači.

PROHLÍŽENÍ MÉDIÍ

Chcete-li exportovat, odstranit nebo zařadit mezi oblíbené položky soubor, který právě prohlížíte, stiskněte zaškrťovací políčko v levém horním rohu miniatury a poté stiskněte příslušné tlačítko v levé části obrazovky.

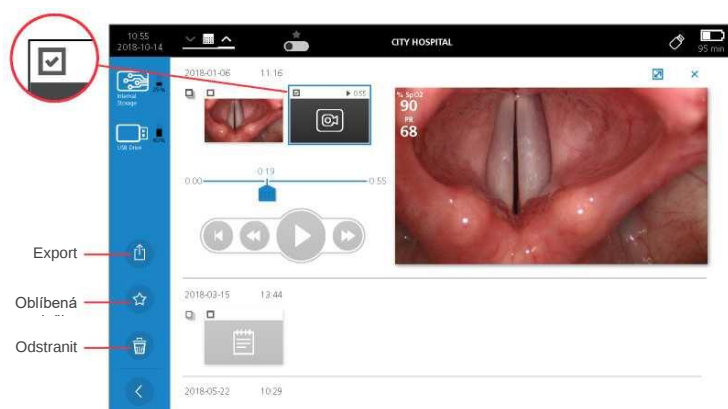

PŘEHRÁVÁNÍ VIDEO

9. Pro přehrání nahraného videa stiskněte jeho miniaturu. Otevře se okno Přehrávání videa.




10. Ovládací prvky v okně Přehrávání videa nabízejí tyto funkce:

TLAČÍTKO	FUNKCE
	Restart: Skočí zpět na začátek videa.
	Skočit zpět: Vráti vybrané video zpět o 20 %.
	Přehrát video: Přehraje vybrané video. Během přehrávání se změní na tlačítko pozastavení.
	Pozastavit video: Pozastaví přehrávání videa. Během pozastavení se změní na tlačítko přehrávání.
	Skočit vpřed: Přeskočí ve vybraném videu dopředu o 20 %.
	Místo přehrávání: Zobrazuje aktuální místo ve videu. Přesunutí ikony na vodorovné ose lze skočit na konkrétní místo ve videu.
	Roztáhnout: Roztáhne video na celou obrazovku se zachováním správného poměru stran.


PROHLÍŽENÍ RYCHLÉHO SNÍMKU

11. Pro zobrazení zachyceného rychlého snímku stiskněte jeho miniaturu. Otevře se Prohlížeč fotografií.

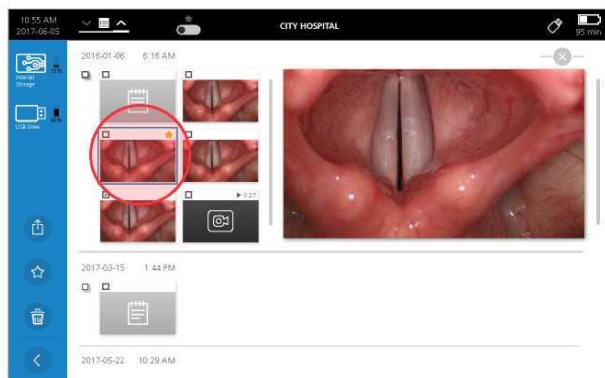

PROHLÍŽENÍ POZNÁMEK K PACIENTOVÍ

12. Pro zobrazení poznámky k pacientovi stiskněte její miniaturu. Otevře se prohlížeč poznámek.

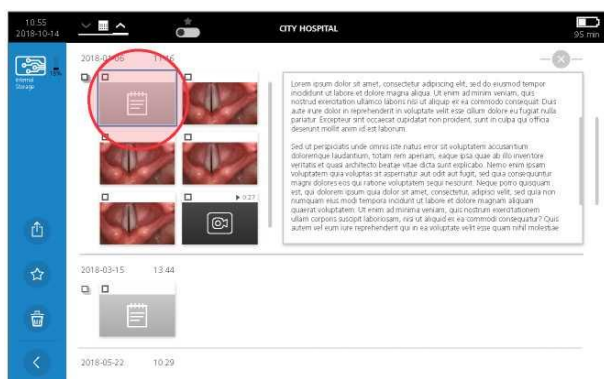

13. Chcete-li poznámku upravit, klepněte kurzorem uvnitř textového pole. Zobrazí se klávesnice. Tuto operaci lze provést pouze v rámci jedné relace.



14. Pomocí klávesnice upravte poznámku dle potřeby a poté stiskněte potvrzovací tlačítko pro uložení změn.
Poznámka: Alternativní varianty pro určitý znak zobrazíte stiskem a přidržením příslušného znaku.

ZPRACOVÁNÍ K OPAKOVANÉMU POUŽITÍ

Některé součásti popsané v tomto návodu mohou před dalším použitím nebo za specifických okolností vyžadovat čištění, nízkou či vysokou úroveň dezinfekce nebo sterilizaci. Informace o požadavcích na čištění, dezinfekci a sterilizaci najdete v Návodu ke zpracování produktů GlideScope a GlideRite k opakovanému použití (GlideScope and GlideRite Products Reprocessing Manual), který je k dispozici na adrese verathon.com/product-documentation.

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Kromě rutinních kontrol před každým použitím a po něm by se měly provádět pravidelné kontroly zaměřené na zachování bezpečného a efektivního provozu. Doporučujeme provést nejméně jednou za tři měsíce kompletní vizuální kontrolu všech součástí osobou obeznámenou s tímto přístrojem. Kontrolující osoba by se měla zaměřit na následující vlastnosti systému:

- Vnější poškození vybavení
- Poškození napájení nebo adaptéru
- Poškození konektorů nebo izolace kabelů

Jakékoli podezření na závadu prosím oznamte zákaznické podpoře nebo svému zástupci společnosti Verathon. Kontaktní informace najdete na stránce verathon.com/global-support.

BATERIE SYSTÉMU GLIDESCOPE CORE

Za normálních provozních podmínek si baterie monitoru uchová plnou kapacitu nabití na přibližně 500 nabíjecích cyklů. Poté může dojít ke snížení její kapacity. Další informace o baterii viz [Specifikace baterie](#) na [straně 49](#).

Baterii nelze uživatelsky vyměnit. V případě nesprávné funkce baterie se nepokoušejte o její výměnu. Jakékoli pokusy o výměnu baterie neautorizovanými servisními technikami mohou způsobit vážné poranění obsluhy a neplatnost záruky. Se žádostí o další informace k výměně baterie se prosím obračejte na svého zástupce zákaznické podpory společnosti Verathon.

SYSTÉMOVÝ SOFTWARE

Společnost Verathon může vydávat aktualizace softwaru pro videomonitor. Aktualizace softwaru dodává přímo společnost Verathon nebo její autorizovaný zástupce; návod k instalaci je součástí dodávky.

V tomto návodu jsou uvedeny nejnovější verze softwaru v době přípravy dokumentu. Pokud váš monitor nefunguje dle popisu v tomto návodu nebo si chcete ověřit, nemá-li být váš software aktualizován, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Verathon.

Neprovádějte aktualizace softwaru pocházející od nezávislých poskytovatelů ani se nepokoušejte provádět úpravy stávajícího softwaru. V opačném případě může dojít k poškození monitoru a zneplatnění záruky.

Informace o jazykových možnostech softwaru viz [Tlačítka, ikony a spojení](#) na straně 8.

OPRAVY ZAŘÍZENÍ

Součástí systému GlideScope Core nelze uživatelsky opravovat. Společnost Verathon neposkytuje schémata elektrických obvodů, seznamy dílů, popisy ani jiné informace, které by byly potřebné k opravě přístroje a jeho příslušenství. Všechny servisní úkony musí provádět kvalifikovaný technik.

S případnými dotazy se obraťte na svého zástupce nebo zákaznickou podporu společnosti Verathon.



Přečtěte si prosím část [Varování a upozornění](#).

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Tento přístroj a jeho příslušenství může obsahovat baterie a jiné materiály nebezpečné pro životní prostředí. Jakmile přístroj dosáhne konce životnosti, musí být zlikvidován v souladu s požadavky směrnice o OEEZ. Likvidaci koordinujte se svým servisním oddělením společnosti Verathon nebo se řiďte místními předpisy pro likvidaci nebezpečného odpadu.

OMEZENÁ ZÁRUKA

ORIGINÁLNÍ ÚPLNÁ ZÁRUKA

Tuto Omezenou záruku („Záruka“) poskytuje společnost Verathon Inc. („Verathon“) svému zákazníkovi, distributorovi, výrobci originálního vybavení, koncovému uživateli nebo jinému kupujícímu („Kupující“) podle podmínek zde uvedených k produktu GlideScope („Produkt“). Podmínky této Záruky jsou podřízeny standardním Obchodním podmínkám nebo jiným zvlášť sjednaným dohodám mezi stranami.

ROZSAH KRYTÍ: Touto Zárukou jsou kryty servisní zásahy a opravy všech poruch (mechanických, elektrických a jiných závad) spojených s Produktem zakoupeným Kupujícím od společnosti Verathon, včetně náhodných pádů nebo nesprávné manipulace s Produktem (pod podmínkou, že Kupující uhradí srážku za výměnu Produktu) po dobu dvou (2) let od data odeslání Produktu („Doba platnosti“) a tato Záruka platí pouze pro původního Kupujícího. Náhradní díly budou dle výhradního uvážení společnosti Verathon nové, originálně opravené nebo vyrobené neoriginálním výrobcem a budou splňovat specifikaci výrobce Produktu.

Verathon provede opravy a výměny („Služby“) pouze u Produktů zakoupených u autorizovaného dealera. Pokud byl Produkt zakoupen u neautorizovaného dealera nebo bylo odstraněno, poškozeno nebo změněno sériové číslo, Záruka je neplatná.

Pokud Produkt zakoupený Kupujícím vyžaduje provedení Služby, Verathon dle svého uvážení Produkt opraví nebo vymění a na žádost Kupujícího může zapůjčit Produkt náhradní. Požádá-li Kupující o zapůjčení náhradního Produktu, zašle vadný Produkt společnosti Verathon (vyčištěný a dezinfikovaný dle situace) ihned po doručení náhradního Produktu od společnosti Verathon. Kupující zapůjčený Produkt vrátí do dvou (2) pracovních dnů od doručení opraveného nebo vyměněného Produktu. Všechny vyměněné díly přecházejí do vlastnictví společnosti Verathon.

VÝLUKY: Z této Záruky jsou vyloučeny problémy způsobené jednáním Kupujícího (nebo jeho nekonáním), jednáním druhých nebo událostmi mimo příměřenou kontrolu společnosti Verathon, mezi něž mimo jiné patří:

- Nehoda, krádež, nesprávné použití, zneužití, mimořádné opotřebení nebo nedbalost.
- Nevhodné použití, zneužití či jiné nedodržení pokynů společnosti Verathon k použití produktů a jejich bezpečnostních upozornění uvedených v Návodu k použití a údržbě. Tato Záruka neplatí, pokud se prokáže expozice Produktu teplotám vyšším než 60°C (140°F).
- Použití systému ve spojení s jiným hardwarem, softwarem, součástmi, službami, příslušenstvím, připojenými prvky, rozhraními nebo spotřebním materiálem, než dodává nebo ve specifikaci předepisuje společnost Verathon.
- Produkty, na nichž byla prováděna oprava nebo údržba jinou osobou, než je společností Verathon autorizovaný poskytovatel služeb.
- Úpravy, demontáž, jiné zapojení, přepracování, recalibrace či přeprogramování Produktu odlišné od úkonů výslovně písemně schválených společností Verathon.

KRYTÉ SOUČÁSTI: Zárukou jsou kryty následující součásti:

- Videomonitory GlideScope Core
- GlideScope Core Smart Cable
- GlideScope Core OneTouch Smart Cable

Není-li uvedeno jinak, na další opakovaně použitelné součásti zakoupené zvlášť nebo jako součást určitého systému, včetně pracovních stanic GlideScope a videokabelu GlideScope, se vztahuje omezená jednoletá záruka. Tato Záruka se nevztahuje na spotřební materiál.

ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY: Kupující si může zakoupit Prémiovou úplnou záruku, která rozšiřuje tuto Omezenou záruku. Se žádostí o další informace se prosím obraťte na zákaznickou podporu společnosti Verathon nebo na svého zástupce.

OMEZENÉ NÁROKY: Tato Záruka propůjčuje Kupujícímu konkrétní právní nároky, které se mohou lišit podle místních právních předpisů. Jestliže na základě platných právních předpisů nelze předpokládané záruky vyloučit jako celek,

budou tyto záruky omezeny na dobu trvání platné písemné záruky, a pro evropské zákazníky se nepoužijí žádné zde uvedené podmínky omezující odpovědnost společnosti Verathon v rozsahu, v němž jsou v rozporu s povinnými ustanoveními o odpovědnosti za výrobky.

V MAXIMÁLNÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU JSOU VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY A NÁROKY VÝLUČNĚ A VÝSLOVNĚ NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ČI PODMÍNKY, AŽ UŽ PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, VÝSLOVNĚ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK ZPŮSOBILOSTI UVEDENÍ NA TRH ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, USPOKOJIVÉ KVALITY, SOULADU S POPISEM A NEPORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ, A VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ MOŽNOSTI SE TÍMTO VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ.

PŘEVOD SLUŽBY: Tato Záruka se vztahuje pouze na Kupujícího a nelze ji právním ani jiným jednáním převádět na třetí strany.

SPECIFIKACE PRODUKTU

SPECIFIKACE SYSTÉMU, NORMY A SCHVÁLENÍ

Tabulka 8. Specifikace systému Core



OBECNÉ SPECIFIKACE		
Klasifikace:	Elektrická třída II, aplikovaný díl BF	
Síťové napětí:	Rozmezí: 100-240 V AC, 50 a 60 Hz (pokud se na dodaném napájecím kabelu nachází třetí kontakt, neslouží třetí vodič k funkčnímu uzemnění pro napájení zdravotnického prostředku.)	
Stejnoseměrné napájení:	12 V DC, 2,5 A max	
Ochrana proti vniknutí vody:	Videomonitor	IP54
SPECIFIKACE PRO PROVOZ A SKLADOVÁNÍ		
Provozní podmínky		
Teplota:	10-35°C (50 až 95°F)	
Relativní vlhkost:	10-95%	
Atmosférický tlak:	700-1060 hPa	
Přepravní a skladovací podmínky:		
Teplota:	-20-45°C (-4 až 113°F)	
Relativní vlhkost:	10-95%	
Atmosférický tlak:	440-1060 hPa	

* Provozní podmínky konkrétních lžic nebo optických násad najdete v *Návodu k použití a údržbě videolaryngoskopů GlideScope* (GlideScope Video Laryngoscopes Operations & Maintenance Manual) (katalogové číslo 0900-4940).


SPECIFIKACE SOUČÁSTÍ

Tabulka 9. Specifikace systémových součástí

MONITOR GLIDESCOPE CORE 10 (0570-0376)		
Specifikace	Hodnota	
Displej	TFT Color, 1280 x 800 px	
Monitor (A)	25,7 cm (10,1 palce)	
Výška (B)	206 mm (8,1 palce)	
Šířka (C)	269 mm (10,6 palce)	
Hloubka (D)	48,5 mm (1,9 palce)	
Hmotnost	1,318 kg (2,9 lb)	

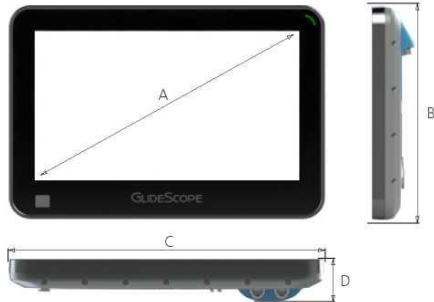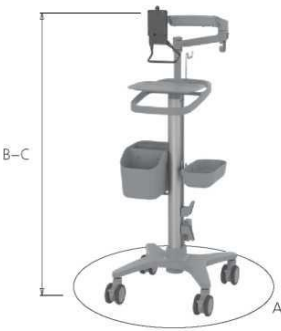MONITOR GLIDESCOPE CORE 15 (0570-0404)		
Specifikace	Hodnota	
Displej	TFT Color, 1366 x 768 px	
Monitor (A)	39,6 cm (15,6 palce)	
Výška (B)	280 mm (11 palců)	
Šířka (C)	415 mm (16,3 palce)	
Hloubka (D)	55,2 mm (2,2 palce)	
Hmotnost	3,100 kg (6,8 lb)	
PRÉMIOVÁ PRACOVNÍ STANICE (0800-0636)		
Specifikace	Hodnota	
Průměr základny (A)	64 cm	
Min. výška (B)	142 cm ± 2 cm	
Max. výška (C)	165 cm ± 2 cm	
Bezpečné pracovní zatížení	42 kg	
PRÉMIOVÁ PRACOVNÍ STANICE (0800-0557)		
Specifikace	Hodnota	
Průměr základny (A)	64 cm	
Min. výška (B)	142 cm ± 2 cm	
Max. výška (C)	165 cm ± 2 cm	
Bezpečné pracovní zatížení	38 kg	
ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ STANICE (0800-0558)		
Specifikace	Hodnota	
Průměr základny (A)	64 cm	

Min. výška (B)	144 cm ± 2 cm
Max. výška (C)	147 cm ± 2 cm
Bezpečné pracovní zatížení	38 kg

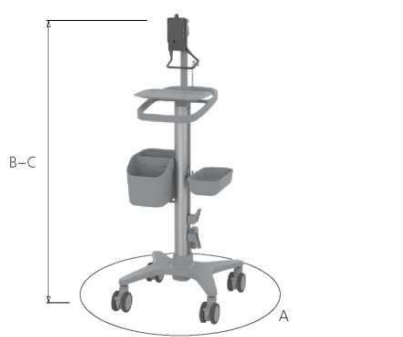

SPECIFIKACE BATERIE

Tabulka 10. Specifikace baterie

STAV	POPIS	
Typ baterie	Lithium-ion	
Kapacita baterie	Core 10	Za normálních provozních podmínek vydrží nová baterie na jedno plné nabití přibližně 135 minut provozu.
	Core 15	Za normálních provozních podmínek vydrží nová baterie na jedno plné nabití přibližně 90 minut provozu.
Doba nabíjení	V režimu offline netrvá nabíjení déle než 4 hodiny od prázdné baterie do plného nabití.	
Jmenovitá kapacita	3350 mAh	
Jmenovité napětí	7,4 V	
Jmenovitá hmotnost	110 g (0,24 lb)	

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Systém je navržen tak, aby splňoval normu IEC 60601-1-2, která stanoví požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) elektrických zdravotnických prostředků. Mezní hodnoty vyzařování a odolnosti stanovené touto normou zajišťují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení u typických zdravotnických instalací.

Systém splňuje platné požadavky na výkon uvedené v normách IEC 60601-1 a IEC 60601-2-18. Z výsledků zkoušek odolnosti vyplývá, že základní výkon systému nebyl v testovacích podmínkách popsanych v tabulkách níže zasažen. Další informace o základním výkonu systému viz [Základní výkon](#) na stránce 1.

ELEKTROMAGNETICKÉ VYZAŘOVÁNÍ

Tabulka 11. Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické vyzářování

Systém je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel systému by měl zajistit použití přístroje v takovém prostředí.

ZKOUŠKA VYZAŘOVÁNÍ	SPLŇUJE	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
Vysokofrekvenční vyzářování CISPR 11	Skupina 1	Systém využívá vysokofrekvenční energii pouze pro vnitřní fungování. Vysokofrekvenční vyzářování je tak velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí žádné rušení blízkých elektronických zařízení.
Vysokofrekvenční vyzářování CISPR 11	Třída A	
Emise harmonického proudu IEC 61000-3-2	Třída A	
Kolísání napětí a fluktuace IEC 61000-3-3	Splňuje	

ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOST

Tabulka 12. Pokyny a prohlášení výrobce - Elektromagnetická odolnost

Systém je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel systému by měl zajistit použití přístroje v takovém prostředí.

ZKOUŠKY ODOLNOSTI	ÚROVEŇ ZKOUŠKY IEC 60601	ÚROVEŇ DODRŽENÍ NORMY	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 16 kV vzduch	Splňuje	Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo z keramických dlaždic. Jsou-li podlahy pokryty syntetickým materiálem, relativní vlhkost musí být alespoň 30 %.
Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů IEC 61000-4-4	± 2 kV pro napájecí vedení ± 1 kV pro vstupní/výstupní vedení opakovací kmitočet 100 kHz	Splňuje	Kvalita síťového napájení musí být na úrovni nemocničního prostředí.
Přepětí IEC 61000-4-5	± 1 kV vedení-vedení ± 2 kV vedení-země	Splňuje	Kvalita síťového napájení musí být na úrovni nemocničního prostředí.
Poklesy napětí, krátká přerušení a kolísání napětí na vstupních napájecích vedeních IEC 61000-4-11	0% UT; na 0,5 cyklu při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0% UT; na 1 cyklus a 70% UT; na 25/30 cyklu Jedna fáze: při 0°	Splňuje	Kvalita síťového napájení musí být na úrovni nemocničního prostředí. Pokud uživatel systému vyžaduje nepřetržitý provoz i během výpadků síťového napájení, doporučujeme systém napájet z nepřerušitelného zdroje napájení nebo z baterie.

Tabulka 12. Pokyny a prohlášení výrobce - Elektromagnetická odolnost

Systém je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel systému by měl zajistit použití přístroje v takovém prostředí.

ZKOUŠKY ODOLNOSTI	ÚROVEŇ ZKOUŠKY IEC 60601	ÚROVEŇ DODRŽENÍ NORMY	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
Magnetické pole o síťovém kmitočtu (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	Splňuje	Magnetická pole o síťovém kmitočtu musí být na úrovni charakteristické pro typické místo v typickém nemocničním prostředí.
Vedená RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 6 Vrms v pásmech ISM 150 kHz až 80 MHz 80% AM při 1 kHz	Splňuje	Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení se nesmí používat v menší blízkosti jakékoli části systému, včetně kabelů, než je doporučená separační vzdálenost vypočítaná z rovnice platné pro frekvenci vysílače. Doporučená separační vzdálenost d (m) $d=1,2 \sqrt{P}$
Vyzařovaná RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz až 2,7 GHz 80% AM při 1 kHz	Splňuje	$d=1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz až 800 MHz $d=2,3 \sqrt{P}$ 800 MHz až 2,5 GHz kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve watttech (W) podle údajů výrobce vysílače a d je doporučená separační vzdálenost v metrech (m). Intenzity pole z pevných RF vysílačů podle elektromagnetického průzkumu lokality ^a musí být nižší než stupeň shody v jednotlivých frekvenčních pásmech. ^b Rušení může nastat v blízkosti zařízení označeného následujícím symbolem: 

Tabulka 12. Pokyny a prohlášení výrobce - Elektromagnetická odolnost

Systém je určen k použití v níže specifikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel systému by měl zajistit použití přístroje v takovém prostředí.

ZKOUŠKY ODOLNOSTI	ÚROVEŇ ZKOUŠKY IEC 60601	ÚROVEŇ DODRŽENÍ NORMY	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

Poznámka: Ut je střídavé napětí sítě před aplikací zkušební úrovně.

Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.

Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí.

- Intenzitu pole z pevných vysílačů, například základnových stanic rádiových (mobilních/bezdrátových) telefonů a pozemních mobilních rádií, amatérských rádií, AM a FM rozhlasového a televizního vysílání, nelze s přesností teoreticky předpovídat. Posouzení elektromagnetického prostředí způsobeného pevnými RF vysílači vyžaduje elektromagnetický průzkum lokality. Pokud naměřená intenzita pole v místě použití systému přesahuje výše uvedenou platnou úroveň RF shody, je nutné pozorováním systému ověřit jeho normální fungování. Pokud zjistíte abnormální fungování, mohou být nezbytná další opatření jako změna orientace nebo přemístění systému.
- Ve frekvenčním pásmu 150 kHz až 80 MHz musí být intenzita pole nižší než 3 V/m.

DOPORUČENÉ ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOSTI

Tabulka 13. Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a systémem GlideScope Core

Systém je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s regulovaným vyzařovaným RF rušením. Zákazník nebo uživatel systému může zabránit elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením (vysílačem) a systémem podle následujících doporučení na základě maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

NOMINÁLNÍ MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON VYSÍLAČE (W)	SEPARAČNÍ VZDÁLENOST PODLE FREKVENCE VYSÍLAČE (m)		
	150 kHz až 80 MHz $d=1,2 \sqrt{P}$	80 MHz až 800 MHz $d=1,2 \sqrt{P}$	800 MHz až 2,5 GHz $d=2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

U vysílačů s nominálním maximálním výstupním výkonem neuvedeným výše lze doporučenou separační vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů výrobce vysílače.

Poznámka: Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo.

Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí.

SHODA PŘÍSLUŠENSTVÍ S NORMAMI

Aby systém udržel elektromagnetické rušení (EMI) ve schválených mezích, musí být používán s kabely, součástmi a prvky příslušenství schválenými nebo dodanými společností Verathon. Další informace viz části [Součásti systému a příslušenství](#) a [Specifikace součástí](#). Při použití jiného příslušenství či kabelů, než uvádí nebo dodává společnost Verathon, může dojít ke zvýšení vyzařování nebo snížení odolnosti systému.

Tabulka 14. Normy EMC pro příslušenství

PRVEK PŘÍSLUŠENSTVÍ	MAX. DÉLKA
Napájecí kabel AC	4,5 m (15 stop)
Napájecí kabel adaptéru DC pro zdravotnické prostředí	1,8 m (6 stop)
GlideScope Core Smart Cable	1,45 m (5 stop)
GlideScope Core OneTouch Smart Cable	1,45 m (5 stop)
Videokabel GlideScope Core video cable	1,57 m (5 stop)
Rychloupínací kabel GlideScope Core QuickConnect Cable	1,57 m (5 stop)
Kabel pulzního oxymetru USB	2 m (6,5 stop)

GLOSÁŘ

V následující tabulce jsou uvedeny definice odborných pojmů použitých v tomto návodu nebo přímo na produktu. Celý seznam symbolů pro upozornění, varování a informace používaných na tomto a jiných produktech společnosti Verathon najdete v *Glosáři symbolů společnosti Verathon* (Verathon Symbol Glossary) na stránce verathon.com/symbols.

POJEM	DEFINICE
A	Ampér
AC	Střídavý proud
AER	Automatický systém pro zpracování endoskopu k opakovanému použití (Automated endoscope reprocessor)
C	Stupeň Celsia
CFR	Code of Federal Regulations (U.S.)
CISPR	Zvláštní mezinárodní výbor pro vysokofrekvenční rušení (International Special Committee on Radio Interference)
cm	centimetr
CSA	Canadian Standards Association (Kanadská asociace pro normy)
DL	Přímá laryngoskopie (Direct laryngoscopy)
EMI	Elektromagnetické rušení (Electromagnetic interference)
ESD	Elektrostatický výboj (Electrostatic discharge)
Základní funkce	Výkon systému potřebný k vyloučení nepřijatelného rizika
F	Stupeň Fahrenheita
g	gram
GHz	gigahertz
HDMI	High-definition multimedia interface
hPa	hektopascal
Hz	Hertz
IEC	Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission)
in	palec
IPA	Isopropylalkohol
ISM	průmyslové, vědecké a zdravotnické (Industrial, scientific, and medical)
kHz	kilohertz
kV	kilovolt
l	litr
lb	libry
m	metr
mAh	miliampérhodina
MDD	Směrnice o zdravotnických prostředcích (Medical Device Directive)
MHz	megahertz
ml	mililitr

POJEM	DEFINICE
mm	milimetr
MSDS	Bezpečnostní list materiálu (Material Safety Data Sheet)
OSHA	Úřad pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci (Occupational Safety and Health Administration) (federální agentura v USA)
psia	libry na čtvereční palec, absolutní (Pounds per square inch absolute)
čistá voda	Voda vhodná pro vysokou úroveň dezinfekce dle místních předpisů a předpisů vašeho zdravotnického zařízení
RF	vysokofrekvenční (Radio frequency)
RH	relativní vlhkost (Relative humidity)
RoHS	Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)
SDS	Natriumdodecylsulfát (Sodium dodecyl sulphate)
V	Volt
Vrms	kvadratický průměr napětí (Voltage root mean squared)
W	Watt
OEEZ	odpadní elektrická a elektronická zařízení

