

# GlideRite rigidní zavaděč pro endotracheální rourky - pokyny k použití

## Prohlášení k zamýšlenému použití

K poskytování podpory pro endotracheální kanylu během intubace.



### VAROVÁNÍ

- Produkt je při dodání nesterilní a je považován za semikritické zařízení. Vyžaduje čištění a dezinfekci vysoké úrovně před prvním použitím a mezi jednotlivými dalšími použitími.
- Před použitím produkt zkontrolujte – je-li poškozený, nepoužívejte jej.
- Mandrén nesmí vyčnívat za distální konec endotracheální (ET) kanyly.
- Mandrén se nesmí zavádět do glottis nebo za hlasivky.
- Všechna zařízení používaná k čištění musí být ve shodě s normou OSHA 29 CFR 1910.1030 platnou v USA nebo s odpovídající místní normou. Další informace naleznete na stránkách [www.osha.gov](http://www.osha.gov).

## Pokyny k použití

1. Před zahájením používání produktu si přečtete všechny pokyny a návody.
2. Ujistěte se, že byla provedena vysoce účinná dezinfekce nebo sterilizace mandrénu.
3. Zkontrolujte, zda mandrén není poškozený. Je-li mandrén poškozený, vyměňte jej.
4. Nasuňte na mandrén ET kanylu (s vnitřním průměrem 6,0 mm nebo větším) tak, aby distální konec mandrénu neprocházel distálním koncem kanyly.
5. Umístěte distální konec ET kanyly tak, aby se nacházel viditelně nad hlasivkami. Nezasouvejte mandrén za hlasivky.
6. Jestliže se ET kanyla zachytí v hlasíkové štěrbině, vytáhněte mandrén o 5 cm (2 palce) zpět.
7. Upravte polohu ET kanyly za použití standardního postupu.
8. Vyjměte mandrén z ET kanyly.
9. Čištění a dezinfekci mandrénu provádějte způsobem popsaným v *Návodu k obsluze a údržbě*.

## Další informace



Viz *Návod k provozu a údržbě rigidního mandrénu GlideRite®*, který je dostupný na adrese [verathon.com/product-documentation](http://verathon.com/product-documentation).



Verathon Inc. 20001 North Creek Parkway, Bothell, WA 98011, USA

0900-2912-09-60